


Nasimed, spray do nosa, 30 ml

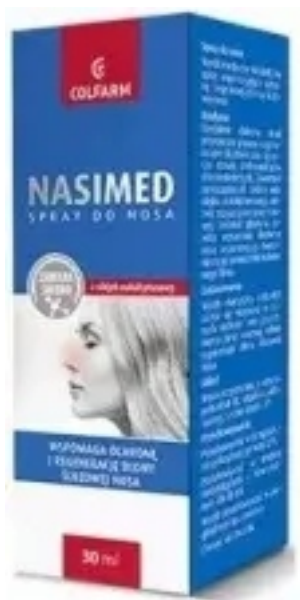

Nasza cena: 23,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Postać	SPRAY DO NOSA
Producent	COLFARM S.A. POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

NASIMED spray do nosa, 30 ml

Nasimed spray do nosa wskazany jest do stosowania w stanach suchości oraz podrażnienia jamy nosowej celem regeneracji błony śluzowej nosa.

Wskazania

Wyrób medyczny Nasimed spray do nosa stanowi wsparcie dla przesuszonej i podrażnionej błony śluzowej nosa. Wspiera procesy regeneracyjne śluzówki oraz zapewnia działanie ochronne. Ponadto ogranicza rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów. W składzie preparatu zawarto nanocząsteczki srebra (srebro aXonnite®), które wraz z olejkami eukaliptusowymi wspomagają oczyszczanie jamy nosowej. Gliceryna zaś nawilża błonę śluzową nosa, powleka ją także ochronnym filmem.

Skład

Woda oczyszczona, gliceryna, polisorbate 20, olejek eukaliptusowy, srebro aXonnite®.

Dawkowanie

Stosować 3-4 razy dziennie.

Sposób użycia

Stosować donosowo.

Aplikator delikatnie umieścić w otworze nosowym.

Skierować na zewnętrzną ścianę nosa, nie dotykając błony śluzowej.

Rozpylić.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.