

Akustone spray do uszu 15ml

Nasza cena: 17,97 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Postać	SPRAY D/USZU
Producent	AFLOPA - PABIANICE POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Akustone to wyrób medyczny przeznaczony do higieny uszu, który pomaga usuwać korki woskowinowe oraz przeciwdziałać ich powstawaniu.

Zawiera m.in. aż 3 naturalne oleje:

- jojoba,
- migdałowy,
- oliwę z oliwek.

AkusTone:

rozpuszcza zalegającą woskowinę,
przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych,
umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny u dzieci lub osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki,
przeciwdziała zaleganiu wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych, u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.

Skład:

Oliwa z oliwek, olej migdałowy, olej jojoba, parafina ciekła, witamina E, polisorbat 80.

Działanie i zastosowanie:

Ze względu na formę aplikacji, produkt jest równomiernie rozprowadzany w przewodzie słuchowym, dzięki czemu nie ma konieczności głębokiego wsuwania aplikatora do ucha.

Dzieci i niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia:

1 rozpylenie

Dorośli:

1-2 rozpylenia do przewodu słuchowego zewnętrznego

Rozpuszczanie korków woskowinowych:

Stosować 3-5 razy dziennie, aż do rozpuszczenia zalegającej woskowiny.

Działanie profilaktyczne oraz odpowiednia higiena uszu:

Stosować 1-2 razy w tygodniu w celu zapobiegania tworzeniu się korków woskowinowych, stosować bezpośrednio przed kąpielą w celu przeciwdziałania zaleganiu wody w uchu.

U dzieci i niemowląt wyrób powinien być aplikowany z zachowaniem ostrożności przez osobę dorosłą. Aplikatora nie wsuwać zbyt głęboko do ucha, aby nie uszkodzić narządu słuchu. Po zastosowaniu wyrobu nie ma potrzeby dodatkowego przepłukiwania przewodu słuchowego. Przed pierwszym użyciem należy kilka razy energicznie nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia i uzyskania prawidłowego rozpylenia wyrobu. Po użyciu wyrobu, końcówkę należy umyć pod bieżącą wodą i delikatnie osuszyć.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.