

Akutol spray do bezbolesnego usuwania plastrów 35ml

Nasza cena: 20,73 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	35 ml
Producent	SALUS INTERNATIONAL POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Akutol spray do bezbolesnego usuwania plastrów 35ml

Spray na plastry - Idealne rozwiązanie na szybkie, łatwe i bezbolesne usunięcie plastra/opatrunku.

Szczególnie polecany dla:

- dzieci i dorośli aktywnie spędzający czas,
- osoby stosujące plastry hormonalne/nikotynowe,
- pacjenci specjalistycznych placówek: m.in. ze stomią, cukrzycą.

Zastosowanie:

- usuwanie plastrów kryjących i transdermalnych,
- opatrunków przylepnych i innych wyrobów medycznych przyklejanych do powierzchni ciała (plastry nikotynowe, plastry kinesiotapingowe na bazie kleju akrylowego, elektrody EKG).

Dlaczego warto kupić?

- jest bezpieczny i przyjazny dla skóry
- nie wpływa na proces gojenia rany i nie jest wchłaniany przez ranę
- działa delikatnie także na wrażliwą i bardzo suchą, popękaną lub naruszoną skórę (testowany dermatologicznie)
- leczone miejsce pozostaje czyste i przygotowane do przyklejenia nowego plastra
- wydajny (do 200 aplikacji z opakowania)

Instrukcja stosowania:

Skóra w obrębie plastra powinna być czysta i sucha przed użyciem sprayu. Plaster należy spryskać sprayem z odległości 10-15 cm od skóry, w celu jego nawilżenia. Odczekać 10-15 sekund i zerwać plaster szybkim ruchem. W przypadku plastrów nieprzepuszczalnych należy spryskać róg plastra i po kilku sekundach podnieść krawędź plastra. Następnie ponownie spryskać i zdejmować plaster partiami do całkowitego usunięcia.

Akutol Spray do usuwania plastrów może stosować każdy, również dzieci i osoby chorujące na cukrzycę. Stosowanie w przypadku kobiet ciężarnych i karmiących piersią należy skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku reakcji alergicznej na któryś ze składników preparatu.

W przypadku ran przewlekłych z powodów higienicznych preparat powinien stosować tylko jeden pacjent.

Uwaga:

Pojemnik pod ciśnieniem: podczas podgrzewania może eksplodować. Chronić przed ciepłem, gorącymi powierzchniami, iskrami, otwartym płomieniem i innymi źródłami ognia. Zakaz palenia. Pojemnika po użyciu nie przebijać ani nie spalać. Chronić przed promieniami słonecznymi. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać sprayu. Chronić oczy i błony śluzowe przed aerozolem. Zawartość/opakowanie należy przekazać w punkcie zbiórki odpadów jako odpad niebezpieczny. Termin ważności: Zużyć przed upływem daty podanej na dnie opakowania.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.