

Artelac Rebalance, nawilżające krople do oczu, 10 ml



Nasza cena: 37,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROPLE D/OCZU
Producent	DR MANN PHARMA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Artelac Rebalance, nawilżające krople do oczu, 10 ml

Wyrób medyczny Artelac Rebalance to krople do oczu przeznaczone do nawilżania oczu i zwilżania soczewek kontaktowych.

Postać

Krople do oczu

Wielkość opakowania

10 ml

Właściwości i działanie

Nawilżające krople do oczu Artelac Rebalance zawierają związki fizjologicznie występujące w oku i łzach:

- hialuronian sodu –nawilżający powierzchnię oka;
- substancje odżywcze i jony – potas, wapń, magnez i sód.

Dodatek witaminy B12 nadaje kroplom różową barwę, nie powodując przy tym plamienia soczewek ani ubrań. Rozprasza się na powierzchni oka pod wpływem mrugania. Krople nawilżające zawierają również środek konserwujący Oxyd. W momencie kontaktu z powierzchnią oka, szybko ulega on przemianom w wodę, tlen i sól.

Składniki przywracają fizjologiczną równowagę osmotyczną filmu łzowego i powierzchni oka.

Artelac Rebalance to krople do oczu, które zapewniają nawilżenie i łagodzą objawy suchego oka, takie jak: pieczenie, łzawienie, zmęczenie, bolesność i uczucie piasku pod powiekami.

- Wieloskładnikowy preparat nawilżający oczu i soczewki kontaktowe.
- Długotrwałe nawilżenie oczu zmniejszające zaburzenia widzenia związane z zespołem suchego oka.

- Łagodzenie objawów zespołu suchego oka przy nawracającej suchości, zmęczeniu i podrażnieniu oczu.
- Możliwość stosowania przez 2 miesiące po otwarciu.

Stosowanie - jak stosować krople do oczu Artelac Rebalance?

Artelac Rebalance to nawilżające krople do oczu w butelce. Można je stosować podczas noszenia wszystkich typów soczewek kontaktowych, zarówno miękkich jak i twardych.

Jak często i jak długo należy stosować krople do oczu Artelac Rebalance?

Należy zaaplikować do oka jedną kroplę produktu Artelac® Rebalance. W razie potrzeby można go używać codziennie.

Sposób użycia

1. Przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce. Usuń nakrętkę ochronną z końcówki butelki. Nie dotykaj końcówki butelki palcami.
2. Odchyl nieznacznie głowę do tyłu. Palcem wolnej ręki delikatnie odciągnij w dół dolną powiekę. Przytrzymaj butelkę pionowo nad okiem, kierując końcówkę do dołu. Delikatnie ściśnij butelkę w celu wypuszczenia 1 kropli.
Aby zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu roztworu, unikaj kontaktu końcówki butelki z oczami lub palcami.
3. Po każdym użyciu ponownie nałóż końcówkę na butelkę.

Skład

0,15% hialuronian sodu, 0,5% glikol polietylenowy 8000 (PEG 8000), chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, chlorek sodu, witamina B12, woda do wstrzykiwań, kwas borowy, Oxyd (delikatny środek konserwujący, który na powierzchni oka przekształca się w wodę, tlen i sól).

Kiedy nie stosować nawilżających kropli do oczu Artelac Rebalance?

Kropli do oczu Artelac Rebalance nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Ważne informacje dotyczące stosowania produktu Artelac Rebalance

- Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takim przypadku należy jednak przerwać stosowanie wyrobu medycznego.
- Nie dotykać powierzchni oka końcówką butelki, aby zapobiec możliwemu urazowi powierzchni oka oraz uniknąć zanieczyszczenia roztworu.
- Po otwarciu produkt może być używany przez 2 miesiące.
- Przed użyciem innych kropli do oczu, należy odczekać co najmniej 15 minut.
- Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego lub butelki.
- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w opakowaniu – zawiera ona ważne informacje na temat stosowania tego produktu.

Przechowywanie

Krople do oczu Artelac Rebalance należy przechowywać w temperaturze +2 do +25oC.
Chronić przed światłem!

Producent

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm.
Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Niemcy

Dystrybutor

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
Aleja Szucha 13/15, 00-580 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.