

# Aspirator Do Nosa Sopelek +3 Jednorazowe Końcówki



Nasza cena: 18,18 zł

## Opis słownikowy

Producent	SALUS INTERNATIONAL POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Aspirator do nosa Sopelek umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu przywrócić swobodne oddychanie i dobre samopoczucie. Systematyczne oczyszczanie noska pozwala zapobiec lub ograniczyć infekcje w:

- górnych drogach oddechowych (zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych)
- solnych drogach oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc)

Aspirator do nosa Sopelek jest oryginalnym polskim wyrobem medycznym. Produkt otrzymał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

### Dawkowanie - Aspirator Do Nosa Sopelek +3 Jednorazowe Końcówki

- Nałóż końcówkę (A) z jednorazowym filtrem absorbującym na cylinder główny (B) aspiratora
- Umieść ustnik (C) w swoich ustach, a końcówkę (A) z jednorazowym filtrem absorbującym w prawym lub lewym otworze nosowym małego dziecka.
- Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wyciągaj powietrze przez ustnik (C)
- Powtórz czynność z pkt. 2 i pkt. 3 w drugim otworze nosa małego dziecka.
- Zdejmij zanieczyszczoną końcówkę (A) z jednorazowym filtrem absorbującym i wyrzuć ją.

### Składniki - Aspirator Do Nosa Sopelek +3 Jednorazowe Końcówki

Budowa aspiratora:

- A) końcówka do nosa z jednorazowym, miękkim filtrem absorbującym
- B) cylinder główny aspiratora
- C) ustnik umożliwiający odciąganie wydzieliny z nosa

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**