

Aspirator Do Nosa Sopelek 3+ Vacuum



Nasza cena: 29,11 zł

Opis słownikowy

Producent	SALUS INTERNATIONAL POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Aspirator do nosa Sopelek umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu przywrócić swobodne oddychanie i dobre samopoczucie.

Systematyczne oczyszczanie noska pozwala zapobiec lub ograniczyć infekcje w:

- górnych drogach oddechowych (zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych)
- solnych drogach oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc)

Aspirator do nosa Sopelek jest oryginalnym polskim wyrobem medycznym. Produkt otrzymał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Budowa aspiratora:

- Aspiratora + 10 jednorazowych filtrów
- Adapter do podłączenia odkurzacza x 1 sztuka
- Jednorazowe podkłady Sopelek baby x 2 sztuki

Sposób użycia:

Odciąganie za pomocą ust:

Metoda może służyć zarówno do codziennej higieny noska jak i do zalegającej wydzieliny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić wszystkie elementy czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element umyć w ciepłej wodzie.

1. Włóż jednorazowy filtr do końcówki
2. Nałóż końcówkę z jednorazowym filtrem na cylinder główny aspiratora.
3. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka.
4. Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik najpierw w jednym, następnie drugim tworze nosowym.
5. Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym Filtrzem z cylindra głównego. Filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie (ok. 90stC) przez max.15 sekund.
6. Wysusz wszystkie elementy i ułóż w pudełku.

Odciąganie za pomocą odkurzacza:

Metoda może służyć tylko do usuwania zalegającej wydzieliny. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić wszystkie elementy czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element umyć w ciepłej wodzie.

1. Włóż jednorazowy filtr do korka , a następnie korek do cylindra głównego. Nałóż końcówkę na cylinder główny aspiratora, a wąż połącz z adapterem z jednej strony i korkiem z drugiej.
2. Włóż adapter do rury ssącej odkurzacza, odsuń odkurzacz na max. odległość od dziecka, następnie włącz urządzenie . Do procesu usuwania wydzieliny z noska używamy odkurzaczy o mocy 500-1800 W.
3. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji i delikatnie dosuń końcówkę Aspiratora w pobliże jednego, następnie drugiego otworu nosowego dziecka (odciąganie powinno trwać max. 5 sekund, ruch góra- dół).
UWAGA: nie zatykać otworu redukcyjnego (dziurka) w węży.
4. Wyłącz odkurzacz, wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z cylindra głównego, a jednorazowy filtr z korka. Filtr wyrzuć wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie (ok. 90stC) przez max. 15 sekund. Adapter i wężyk nie wymagają wyparzania, wystarczy przemyć ciepłą wodą.
5. Wysusz wszystkie elementy i ułóż w pudełku.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.