

Aspirator wydzieliny Sopelek 2



Nasza cena: 17,34 zł

Opis słownikowy

Producent	SALUS INTERNATIONAL POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Aspirator wydzieliny Sopelek 2

Aspirator do nosa Sopelek jest oryginalnym polskim wyrobem medycznym. Produkt otrzymał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Sposób użycia - Aspirator wydzieliny Sopelek 2

- Nałóż końcówkę (A) z jednorazowym filtrem absorbującym na cylinder główny (B) aspiratora.
- Umieść ustnik (C) w swoich ustach, a końcówkę (A) z jednorazowym filtrem absorbującym w prawym lub lewym otworze nosowym małego dziecka.
- Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik (C).
- Powtórz czynności z pkt.2 i pkt.3 w drugim otworze nosa małego dziecka.
- Zdejmij zanieczyszczoną końcówkę (A) z jednorazowym filtrem absorbującym i wyrzuć ją*. * opcjonalnie dopuszcza się wyparzenie zanieczyszczonej końcówki (A) z zastrzeżeniem wymiany jednorazowego filtra absorbującego na nowy.

Jeżeli oddychanie małego dziecka wydaje się bardzo utrudnione, zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego dziecka 3-4 krople soli fizjologicznej lub roztwór soli morskiej do stosowania do nosowego.

Właściwości - Aspirator wydzieliny Sopelek 2

BUDOWA ASPIRATORA

- KOŃCÓWKA do nosa z JEDNORAZOWYM, miękkim FILTREM absorbującym.
- CYLINDER główny aspiratora.
- USTNIK umożliwiający odciąganie wydzieliny z nosa.

Działania

Aspirator do nosa Sopelek umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu przywrócić swobodne oddychanie i dobre samopoczucie. Systematyczne oczyszczanie noska pozwala zapobiec lub ograniczyć infekcje w:

- górnych drogach oddechowych (zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych)

- dolnych drogach oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc).

Uwagi

BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA

- Wyparz końcówkę (A). Ponowne użycie końcówki jednorazowej bez wyparzenia może grozić reinfekcją.
- Cylinder główny aspiratora (B), ustnik (C) wyparz po każdym użyciu oraz stosuj nowe końcówki* (A) z jednorazowym filtrem absorbującym.
- Aspirator przechowuj w suchym i czystym miejscu w opakowaniu jednostkowym.
- Proces odciągania wydzieliny z nosa maluszka może zostać przeprowadzony tylko przez osobę dorosłą.

* opcjonalnie dopuszcza się wyparzenie zanieczyszczonej końcówki (A) z zastrzeżeniem wymiany jednorazowego filtra absorbującego na nowy.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.