

AVILIN spray opatrunek adhezyjny, sterylny, 90 ml



Nasza cena: 36,22 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	90ml
Producent	NES PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

AVILIN Spray opatrunek adhezyjny w leczeniu przewlekłych i trudno gojących się ran

Właściwości

- spełnia na uszkodzonej skórze rolę przylegającego opatrunku,
- tworzy barierę ochronną,
- jest stabilny chemicznie i odporny na środowisko w jakim się znajduje,
- nie ulega degradacji i dzięki temu chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym,
- ze względu na swoją strukturę chemiczną i właściwości fizyko-chemiczne stwarza optymalne środowisko do naturalnych procesów gojenia i regeneracji skóry.

Sposób użycia

Sterylny wyrób medyczny Avilin Spray aplikować na ranę z odległości 10-15 cm, pokrywając całą jej powierzchnię, jeden raz dziennie. Po aplikacji ranę zabezpieczyć jałową gazą. Po użyciu wyrobu medycznego Avilin Spray opakowanie ponownie zamknąć zatyczką plastikową.

UWAGA: Przed użyciem należy oczyścić dyszę poprzez krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zaworka.

Wskazania do stosowania:

- owrzodzenia żylakowate goleni,
- rany niedokrwienne (najczęściej pochodzenia miażdżycowego),
- zespół stopy cukrzycowej,
- odleżyny (owrzodzenia troficzne),
- rany oparzeniowe (pochodzenia termicznego, chemicznego i elektrycznego),

inne rany.

Przeciwwskazania do stosowania:

- rany z silnym krwawieniem,
- rany z dużą ilością rozmiękającej martwicy,
- rany z cechami zakażenia,
- rany z dużą ilością wysięku,
- rany z treścią ropną,
- uczulenie na składniki preparatu.

W wymienionych przypadkach stosowanie opatrunku adhezyjnego Avilin Spray należy skonsultować ze specjalistą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.