

Bańki Gumowe Akupunkturuowe



Nasza cena: 27,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*4
Producent	LU DAO INSTYTUT NOWEJ TECHNIKI CHINY [CN]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Terapia z wykorzystaniem baniek jest od stulecia skuteczną i bezpieczną metodą zwalczania wszelkiego rodzaju chorób. Bezogniowe bańki lekarskie mogą być stawiane również w punktach akupunkturuowych tradycyjnej medycyny chińskiej. Ziołolecznictwo i akupunktura wypierają coraz częściej terapię antybiotykową.

Dawkowanie - Bańki Gumowe Akupunkturuowe

- Wystarczy przystawić tylko jedną bańkę, ale w ściśle określonym punkcie, tzw. punkcie akupunkturuowym.
- Nie wymaga to pomocy drugiej osoby.
- Wystarczy chwycić bańkę oburącz trzymając palcami wskazującymi i środkowymi za dolną jej krawędź, a kciukami naciskając szczyt, lekko przycisnąć do ciała, cofnąć palce i zwolnić ucisk kciuków.
- W zależności od stopnia zgniecenia - przyświe się ona do ciała mocniej lub słabiej.
- Aby usunąć bańkę, trzeba lekko nacisnąć skórę przy jej krawędzi.
- Gumowe bańki można stawiać co drugi dzień na 15-20 minut.
- Cała kuracja powinna obejmować 10 zabiegów.

Działania

- Działają podobnie jak akupunktura. Przystawiając bańkę w określonym punkcie ciała, wyrównujemy poziom energii w miejscach chorych.
- Bańki akupunkturuowe stawia się w ściśle określonych punktach ciała w zależności odschorzenia wykorzystując wiedzę stosowaną w akupunkturze.
- Organizm łatwiej oczyszcza się z szkodliwych substancji.

Wskazania - Bańki Gumowe Akupunkturuowe

Bańki stosowane są do leczenia wielu chorób i dolegliwości takich jak: infekcje, przeziębienia, astma, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości żołądkowe, impotencja, prostata, czyraki, hemoroidy, schorzenia stawów, bóle mięśniowe, stany zapalne ścięgien i inne.

Inne zastosowanie: do usuwania obcych ciał, pasożytów skóry (np. kleszczy), pozostałości jadu po ukąszeniu owadów i węży

Przeciwwskazania - Bańki Gumowe Akupunkturuowe

Baniek nie należy stosować w przypadku:

- zaburzeń krzepliwości krwi;
- wylewów podskórnych i obrzęków spowodowanych stłuczeniem lub skręceniem;
- na uszkodzoną skórę, w szczególności na otwarte rany;
- u kobiet w ciąży nie stawiać na brzuch i nie stosować zbyt wysokiego ciśnienia zasysania;
- u dzieci i osób bardzo wychudzonych nie stosować w okolicach łopatek, kręgosłupa, sutków, koniuszka serca, żołądka oraz jamy brzusznej.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.