


Blephademodex chusteczki do powiek i rzęs x 30

Nasza cena: 65,36 zł

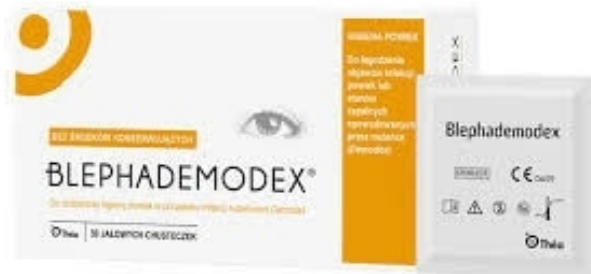

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Producent	LAB.THEA FRANCJA [FR]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Gotowe do użycia chusteczki nasączone są specjalistycznym płynem oczyszczającym zawierającym:

Terpinen-4-ol - aktywny składnik wyizolowany z olejku drzewa herbacianego, o wysokim stopniu czystości, który ma właściwości biobójcze na nużeńca, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Hialuronian sodu - naturalny środek nawilżający skórę, który ma właściwości kojące, łagodzące i regenerujące skórę wrażliwą i podrażnioną.

Blephademodex przeznaczony jest do:

- codziennej higieny powiek w przypadku infekcji nużeńcami (Demodex)
- do łagodzenia objawów infekcji powiek lub stanów zapalnych spowodowanych przez nużeńce (Demodex)

Nużeniec jest najczęstszym mikroskopijnym pasożytem skóry. Zakażenie nim prowadzi do stanu zapalnego powiek. Nużeniec nie jest usuwany podczas zwykłych, codziennych zabiegów oczyszczających. Obecność łupieżu cylindrycznego (złogów wokół podstawy rzęs) wyraźnie wskazuje na zakażenie nużeńcem. Blephademodex oczyszcza powieki i rzęsy ze strupków (osadów), łupieżu, zanieczyszczeń oraz czynników zakaźnych, usuwa pasożyty, dzięki czemu łagodzi objawy związane z zakażeniem nużeńcami (Demodex), takie jak: swędzenie, pieczenie, suchość i stan zapalny powiek. Zaczerwienienie brzegów powiek, uczucie podrażnienia i obecności ciała obcego w oku ulegają zmniejszeniu.

Jedno opakowanie Blephademodex zawiera 30 jednorazowych chusteczek, które:

- są miękkie i wygodne
- są jałowe i gotowe do użycia

Blephademodex jest dobrze tolerowany, ponieważ nie zawiera detergentów, konserwantów i substancji zapachowych. Nie wymaga spłukiwania po użyciu.

Jak stosować Blephademodex?

Chusteczki Blephademodex używaj, wykonując opisane poniżej czynności:

- Umyj dokładnie ręce.
- Otwórz saszetkę i wyjmij znajdującą się tam chusteczkę.
- Rozłóż ją i zawiń na palcu wskazującym.
- Trzymając oko zamknięte, delikatnie przyłóż chusteczkę na powiekę i przy nasadzie rzęs oraz wzdłuż nasady rzęs ostrożnie masuj powiekę małymi, okrężnymi ruchami, usuwając wszelkie strupki (zanieczyszczenia), łupież czy wydzielinę.
- Trzymaj oko zamknięte przez 15 sekund po aplikacji.
- Czynność powtórz wokół drugiego oka, używając nowej chusteczki.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.