

Cerumex Md, spray, 30 ml



Nasza cena: 26,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30ml
Postać	SPRAY
Producent	AXFARM POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Łagodny preparat przeznaczony do stosowania w profilaktyce niedosłuchu przewodzeniowego spowodowanego nadmiernym gromadzeniem się woszczyzny w przewodzie słuchowym zewnętrznym u dzieci i dorosłych.

Dawkowanie - Cerumex Md, spray, 30 ml

1. Preparat ogrzać w dłoni do temperatury ciała.
2. Przechylić głowę na bok.
3. Wlać do jednego ucha od 5 do 10 kropli preparatu starając się aby nie wydostał się na zewnątrz. Dla lepszego działania, należy pozostać z przechyloną głową przez kilka minut, aby zapobiec wypłynięciu preparatu na zewnątrz.
4. Zakręcić butelkę po każdym użyciu.
5. Powtarzać zakraplanie 2 razy dziennie przez okres do 4 dni. Resztki woszczyzny można wypłukać wodą pod prysznicem przy okazji mycia głowy o temperaturze około 37°C.

Składniki - Cerumex Md, spray, 30 ml

Aqua, Glycerin, Sodium, Bicarbonate phenoxyethanol (and ethylhexylglycerin).

Działania

Cerumex MD regularnie stosowany pozwala usuwać pozostałości woskowiny z przewodu słuchowego jako profilaktyka zatkanego ucha. Cerumex MD ułatwia rozmiękanie twardych czopów woskowinowych.

Wskazania - Cerumex Md, spray, 30 ml

Cerumex MD to łagodny środek zawierający bezpieczne i skuteczne substancje, które penetrując do woszczyzny powodują jej rozmiękanie i rozpuszczenie.

Przeciwwskazania - Cerumex Md, spray, 30 ml

Nie stosować preparatu przy wyciekach z ucha, podrażnieniu, wysypce w uchu, zawrotach głowy, urazie lub perforacji błony bębenkowej, drenażu błony bębenkowej.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.