

Cerumex spray do uszu 15ml



Nasza cena: 21,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Postać	SPRAY D/USZU
Producent	AXFARM POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Preparat przeznaczony do stosowania w profilaktyce niedosłuchu przewodzeniowego, spowodowanego nadmiernym gromadzeniem się woszczyzny w przewodzie słuchowym zewnętrznym, u dorosłych i dzieci.

Zastosowanie:

- Cerumex to bezpieczny i skuteczny preparat do rozpuszczania i usuwania woskowiny usznej
- Cerumex regularnie stosowany usuwa pozostałości woskowiny i stanowi profilaktykę zatkanego ucha
- Cerumex ułatwia rozmiękczenie twardych czopów woskowinowych.
- Jest szczególnie skuteczny przy użyciu 30 minut przed zabiegiem płukania ucha.
- Cerumex przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3 miesiąca życia.

Sposób użycia:

- Butelkę z preparatem ogrzać w dłoni do temperatury ciała.
- Zaaplikować do każdego ucha maksymalnie 5 kropli 2 razy dziennie aż do rozpuszczenia woskowiny
- Powtarzać aplikację 2 razy dziennie przez okres do 5 dni
- Resztki woszczyzny można wypłukać wodą pod prysznicem przy okazji mycia głowy wodą o temperaturze około 37°C
- W celu ułatwienia zabiegu płukania ucha najlepiej jest zastosować cerumex spray 30 minut przed zabiegiem płukania

Skład wyrobu:

Aqua purificata, glycerin, sodium bicarbonate, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

