

Compeed plastry na pęcherze mix x 5



Nasza cena: 25,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	OMEGA-PHARMA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Kompleksowe rozwiązanie na pęcherze różnej wielkości: na piętę, na palec, z boku stopy. Idealne rozwiązanie w podróży jak i na co dzień.

Hydrokoloid COMPEED to aktywny żel zawierający cząsteczki absorbujące wilgoć. Plaster COMPEED działa jak druga skóra, pomaga utrzymywać naturalne nawilżenie skóry aby:

- Przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez pęcherze.
- Chronić przed otarciami i uciskiem.
- Zapewniać szybkie gojenie się ran.
- Pozostaje na miejscu przez kilka dni.
- W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

Zawartość opakowania:

5 hydrokoloidowych plastrów na pęcherze: (2 plastry średnie, 2 plastry wąskie, 1 plaster na palce stóp)

Sposób użycia:

- Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta pęcherzem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki.
- Usuń górną warstwę papierową plastra starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
- Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
- Pozostaw plaster na pęcherzu, aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (Uwaga: może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni).
- Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij wzdłuż skóry

UWAGA:

- Nie powinno się celowo przekłuwać pęcherzy, ponieważ goją się one lepiej pod warstwą zapewniającą ochronę naskórka.
- Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED.
- Nie stosować na zainfekowane rany.
- Nie stosować ponownie tego samego plastra w celu uniknięcia infekcji.
- W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się, przerwij leczenie i skonsultuj się z lekarzem.
- Ewentualne ślady po plastrze mogą być łatwo usunięte za pomocą rozpuszczalnika (np. benzyny ekstrakcyjnej) przestrzegając przy tym instrukcji użycia producenta.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
- Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza przed użyciem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.