

Corega Krem Super Mocny 40 g



Nasza cena: 19,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	40g
Producent	STAFFORD MILLER DUNGARVAN IRLANDIA [IE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Krem Corega zapewnia mocne, długotrwałe utrzymanie protezy zębowej. Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię. Daje pewność siebie przez cały dzień.

Dawkowanie - Corega Krem Super Mocny 40 g

Dla zapewnienia bezpiecznego utrzymania protezy zębowej krem należy stosować raz dziennie. Zaczynać od małej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości kremu może powodować jego wypływanie. W przypadku wypłynięcia, należy użyć mniej kremu przy kolejnym użyciu. Nie należy stosować częściej, niż raz dziennie. Tubka kremu powinna wystarczyć na minimum 3 tygodnie stosowania. Jeśli wystarcza na krócej, oznacza to nadmierne zużywanie kremu, co może być objawem nieprawidłowego dopasowania protezy. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania kremu i skonsultować dopasowanie protezy ze swoim lekarzem dentystą.

Sposób aplikacji kremu mocującego:

- Umyj i wysusz protezę. W celu uzyskania najlepszego efektu czyszczenia zalecamy używanie tabletek Corega Tabs.
- Nanieś kilka krótkich (6mm) pasków kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.
- Wypłucz jamę ustną przed założeniem protezy.
- Załóż protezę, dociśnij ją i na kilka sekund przygrzyź.

Sposób wyjmowania protezy zębowej:

- Zwilż jamę ustną
- Wyjmuj protezę powoli jednocześnie ją poruszając
- Usuń resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki
- Po oczyszczeniu protezy zalecamy użycie tabletek Corega Tabs.

Składniki - Corega Krem Super Mocny 40 g

Poly(methylvinylether/maleic acid) sodium-calcium mixed partial salt, petrolatum blend W-180, carboxymethylcellulose sodium, mineral oil light, spray dried peppermint, spray dried spearmint, erythrosine lake paste, propylparaben.
Nie zawiera cynku.

Działania

Krem mocujący do protez zębowych COREGA Super Mocny:

- Zapewnia mocne, długotrwałe utrzymanie protezy zębowej.
- Uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię.
- Poprawia stabilność protezy.
- Zwiększa siłę zgryzu i pozwala spożywać „trudne pokarmy”.
- Ma miętowy smak i zapewnia długotrwałe uczucie świeżości.
- Zwiększa komfort użytkowania protezy nawet gdy jest ona dobrze dopasowana.

Wskazania - Corega Krem Super Mocny 40 g

Corega- krem mocujący do protez zębowych pełnych i częściowych.

Przeciwwskazania - Corega Krem Super Mocny 40 g

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Uwagi

Nie używać jeśli występuje reakcja alergiczna na składniki zawarte w kremie. Nieliczne osoby mogą być uczulone na składniki tego produktu. Jeżeli wystąpi podrażnienie, należy zaprzestać używania. Nie zawiera cynku.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.