

# COREGA MAX MOCOWANIE + ŚWIEŻOŚĆ krem do protez, 40 g



Nasza cena: 20,92 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	KREM
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## COREGA MAX MOCOWANIE + ŚWIEŻOŚĆ krem do protez, 40 g

COREGA MAX MOCOWANIE + ŚWIEŻOŚĆ to krem do protez zapewniający stabilizację protezy zębowej i komfort jej użytkowania przez cały dzień.

## Właściwości

Krem do protez COREGA MAX MOCOWANIE + ŚWIEŻOŚĆ zapewnia stabilne utrzymanie protezy przez cały dzień. Co więcej, zapobiega również przedostawaniu się drobinek jedzenia pod płytę protezy. Dzięki temu możesz delectować się jedzeniem i nie myśleć o uzupełnieniu protetycznym.

## Stosowanie

Oczyść i osusz protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygrzyź ją na kilka sekund i gotowe! Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezę.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**