

Corega Original Extra Silny XL (IMP.ROW.CZECHY), 70g



Nasza cena: 23,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	70 g
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Krem mocujący do protez zębowych o delikatnym miętowym smaku. Skład: calcium-sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430. Działanie:

Krem mocujący Corega gwarantuje mocne utrzymanie protezy zębowej przez cały dzień. Nie posiada w składzie cynku. Krem Corega uszczelnia protezę a także zapobiega przedostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię, nawet jeśli jest dobrze wykonana i dopasowana. Tuba z kremem posiada precyzyjną końcówkę, ułatwiającą aplikację kremu. Corega dodaje pewności siebie przez cały dzień.

Wskazówki dotyczące aplikacji

- Umyj i dokładnie osusz protezę. Aby uzyskać jak najlepszy efekt czyszczenia zaleca się używanie tabletek Corega Tabs.
- Nanieś kilka krótkich pasków (6 mm) kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.
- Wypłucz jamę ustną przed założeniem protezy.
- Załóż protezę, dociśnij ją, następnie na kilka sekund przygrzyź.

Możliwe działania niepożądane

Krem może powodować nadwrażliwość lub uczulenie u niektórych osób. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu zaleca się natychmiastowe przerwanie stosowania produktu.

Ważne

Aby zapewnić mocne utrzymanie protezy krem należy stosować raz dziennie.

Aby nie spowodować zatkania tubki , końcówka i nakrętka powinny być suche.

Przechowywać krem mocujący w temperaturze pokojowej aby łatwo ją było wyciskać.

Bardzo gorące napoje mogą wpłynąć na zmniejszenie skuteczności kremu mocującego .

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.