

COREGA POWER MAX Mocowanie + Komfort, krem 40g



Nasza cena: 20,92 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	KREM
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

COREGA POWER MAX Mocowanie + Komfort - krem mocujący do protez o neutralnym smaku

Właściwości

Corega Power Max Mocowanie + Komfort to krem mocujący do protez zębowych, bez dodatku aromatów i sztucznych barwników, o smaku neutralnym. Tubka wyposażona jest w precyzyjny aplikator. Teksturowe opakowanie z recyklingu, które podlega dalszemu recyklingowi.

Działanie

- Najsilniejsze mocowanie: najsilniejsza metoda mocowania protez wśród produktów linii Corega - odpowiednia do protez częściowych i całkowitych.
- Komfort: redukuje nacisk protezy.
- Precyzyjna aplikacja: precyzyjny aplikator umożliwiający równe nałożenie produktu pomaga nanieść jego odpowiednią ilość.
- Jedzenie bez obaw: mocowanie do 12 godzin.

Sposób użycia

Oczyść i osusz protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygryź ją na kilka sekund i gotowe. Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezę.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.