

COREGA szczoteczka 2 w 1 do mycia protez zębowych i zębów, 1 sztuka

Nasza cena: 7,43 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	GLAXO SMITH KLINE PHARM.S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

COREGA szczoteczka 2 w 1 do mycia protez zębowych i zębów, 1 sztuka

Szczoteczka 2 w 1 do mycia protez zębowych i zębów marki Corega można łatwo i dokładnie wyczyścić zęby i protezy. Antypoślizgowy uchwyt pozwala wygodnie używać szczoteczki, a miękkie włókna nie rysują materiału, z którego protezy są wykonane. Szczoteczka ma też specjalną końcówkę do usuwania resztek kremu mocującego z protezy. Szczoteczka 2 w 1 Corega jest przeznaczona do używania z pastą do zębów i protez 2 w 1 Corega, ponieważ pasta Corega ma specjalny skład, dzięki któremu nie rysuje protez i delikatnie oczyszcza zęby

Właściwości

- Specjalnie zaprojektowane, miękkie włókna chronią protezę zębową przed zarysowaniami oraz gwarantują wygodne dotarcie do przestrzeni między zębami aby skutecznie i delikatnie usuwać płytkę nazębną nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Antypoślizgowa rączka zapewnia wygodne trzymanie zarówno podczas czyszczenia protezy zębowej, jak i zębów.
- Specjalna końcówka do usuwania kremu mocującego z protezy.

Sposób użycia

Szczoteczka COREGA 2 w 1 jest przeznaczona do używania wraz z Corega pasta 2 w 1 do mycia protez zębowych i zębów i nie powinna być wykorzystywana z innymi produktami do dbania o protezy zębowe.

Do stosowania powyżej 12 roku życia.

Zęby: Wyjmij protezę zębową z jamy ustnej i używaj jak zwykłej szczoteczki do zębów.

Protezy: Nałóż pastę na wilgotną szczoteczkę. Przytrzymaj protezę i wyczyść całą jej powierzchnię.

Ważne

Nadmierne wyginanie główki szczoteczki może doprowadzić do jej złamania.

Nie należy gryźć włókien szczoteczki. Regularnie wymieniaj szczoteczkę.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.