

Cosmos Plaster na otarcia 45 mm x 65 mm, 4 sztuki



Nasza cena: 13,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*4
Producent	Paul Hartmann Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Cosmos Plaster na otarcia 45 mm x 65 mm, 4 sztuki

Hartmann Cosmos Plaster na otarcia 45 mm x 65 mm to sterylne, hydrokoloidowe plastry do zaopatrywania otarć. Polecane szczególnie na otarcia na łokciach oraz kolanach, aby wspomóc proces gojenia oraz uśmierzyć ból.

Właściwości

Hartmann Cosmos Plaster na otarcia to plaster hydrokoloidowy jest oparty na mechanizmie gojenia ran w środowisku wilgotnym (właściwości okluzyjne).

Samoprzylepne hydrokoloidowe opatrunki zawierają warstwę, która pochłania wysięk i przekształca go w żelowo-podobną substancję; zapewnia amortyzację rannego obszaru; niweluje ucisk i tarcie.

Skład

Wykonana z hydrokoloidu.

Stosowanie

Umyć dłonie i nakładać plaster wyłącznie na suchą, czystą i nienatłuszczoną skórę. Otworzyć zapieczętowane papierowe opakowanie i wyjąć plaster. Przed zastosowaniem ogrzać plaster w dłoniach. Usunąć pierwszą folię ochronną i nałożyć odsłoniętą część plastra na powstałe otarcie skóry. Następnie delikatnie pociągnąć drugą folię ochronną i założyć resztę plastra. Lekkie przyciśnięcie i wymodelowanie brzegów plastra zapewnia jego optymalne przyleganie do skóry.

Maksymalny czas stosowania plastra hydrokoloidowego wynosi 4 dni. Jeżeli zamierza się usunąć plaster wcześniej lub w momencie

maksymalnego czasu stosowania, należy go na krótko zmoczyć ciepłą wodą.

Nie należy stosować na ranach zakażonych, silnie krwawiących oraz na ranach oparzeniowych 3. stopnia.

Jeżeli przed założeniem lub w trakcie noszenia plastra pojawią się oznaki wystąpienia infekcji (np. zaczerwienienie i obrzęk), a także w przypadku cukrzycy lub problemów z układem krążenia należy skonsultować się z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.