

Cosmos Plastry na pęcherze (3 rozmiary), 6 sztuk



Nasza cena: 15,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Producent	Paul Hartmann Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Cosmos Plastry na pęcherze (3 rozmiary), 6 sztuk

Hartmann Cosmos Plastry na pęcherze, to hydrokoloidowe plastry do zaopatrywania pęcherzy na dłoniach i stopach.

Właściwości

Hartmann Cosmos Plastry na pęcherze wspomagają proces gojenia oraz uśmierzają ból, a także są wygodne w noszeniu.

Plaster hydrokoloidowy jest oparty na mechanizmie gojenia ran w środowisku wilgotnym (właściwości okluzyjne); samoprzylepne hydrokoloidowe opatrunki zawierają warstwę, która pochłania wysięk i przekształca go w żelowo-podobną substancję, zapewniając amortyzację rannego obszaru oraz niwelując ucisk i tarcie.

Skład

Hydrokoloid.

Stosowanie

Umyć dłonie i nakładać plaster wyłącznie na suchą, czystą i nienatłuszczoną skórę. Ściągnąć folię ochronną z plastra. Nakleić plaster na pęcherz. Lekkie przyciśnięcie i wymodelowanie brzegów plastra zapewnia jego optymalne przyleganie do skóry. Plaster należy usunąć dopiero wtedy, gdy zacznie się sam odklejać lub po 4 dniach od założenia. Aby wcześniej usunąć plaster na pęcherze, należy go na krótko zmoczyć ciepłą wodą. Plaster należy usunąć dopiero wtedy, gdy zacznie się sam odlepić. Aby usunąć plaster wcześniej, należy go zmoczyć ciepłą wodą.

Nie należy go używać na zakażonych lub silnie krwawiących pęcherzach.

Jeżeli przed założeniem lub w trakcie noszenia plastra pojawią się oznaki wystąpienia infekcji (np. zaczerwienienie i obrzęk), a także w przypadku cukrzycy lub problemów z układem krążenia należy skonsultować się z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.