

## Crossvi Intense, krople do oczu, 10 ml



Nasza cena: 35,15 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROP.DO OCZU
Producent	TACTICA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

### Crossvi Intense, krople do oczu, 10 ml

Crossvi Intense to sterylny roztwór o fizjologicznym pH do stosowania okulistycznego, oparty na opatentowanej technologii sieciowania kwasu hialuronowego (HA) za pomocą mocznika, która poprawia i wzmacnia specyficzne właściwości mechaniczne liniowego HA. Usieciowany HA jest znacznie dłużej odporny na działanie hialuronidazy niż liniowy HA, a zatem wykazuje zwiększone i dłuższe działanie lubrykacyjne i nawilżające w porównaniu do liniowego HA.

Uwodniona struktura usieciowanego HA jest w stanie zapewniać wodę przez dłuższy czas, przez co poprawia właściwości lubrykujące liniowego HA, jednocześnie wzmacniając jego działanie nawilżające, a tym samym zalecana jest jako środek wspomagający w zespole suchego oka.

Usieciowany HA jest również skutecznym zmiataczem wolnych rodników, zapewniającym odnowę nabłonka (reepitelializację) oraz lepszą ochronę powierzchni rogówki.

Usieciowany HA nadaje wyrobowi medycznemu właściwości lubrykujące, nawilżające i regenerujące, przynosząc ulgę w stanach suchości oka wywołanych zespołem suchego oka, podrażnieniem lub zmęczeniem oczu w przypadku reakcji zapalnych lub czynników środowiskowych.

Crossvi Intense łagodzi zaczerwienienie, suchość, zmęczenie i uczucie dyskomfortu oczu oraz błony śluzowej oka wywołanych zespołem suchego oka, czynnikami środowiskowymi, takimi jak wiatr, dym, zanieczyszczenia, długotrwała ekspozycja na światło słoneczne, morskie powietrze, wodę morską lub basenową, intensywną naukę lub pracę, długotrwałym korzystaniem z komputera, długimi okresami prowadzenia pojazdu, nieprawidłowościami w łzawieniu po przebytych stanach zapalnych, po operacjach okulistycznych lub chirurgią estetyczną powiek i przewlekłym zapaleniem powiek. Produkt nawilża i lubrykuje powierzchnię suchych oczu powstającą w wyniku używania soczewek kontaktowych.

Formulacja została opracowana w celu zapewnienia maksymalnego komfortu od pierwszego zastosowania. Polecana jest do codziennego użytku, w dzień lub w nocy.

Nie zawiera konserwantów ani/lub cząsteczek o działaniu przeciwzapalnym i zwężającym naczynia krwionośne.

## Wskazania

Crossvi Intense jest zalecany:

- w celu przywrócenia i poprawy stabilności filmu łzowego w przypadku zespołu suchego oka;
- po chirurgii refrakcyjnej oka;
- w celu łagodzenia zaczerwienienia, zmęczenia i uczucia dyskomfortu oczu lub błony śluzowej oka z powodu:
  - czynników środowiskowych (klimatyzacja, nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, wiatr, dym, zanieczyszczenia, woda morską lub basenowa, morskie powietrze);
  - suchości oczu spowodowanej nadmiernym zmęczeniem związanym z długotrwałą pracą przy komputerze, nauką;
  - nieprawidłowości w łzawieniu po przebytych stanach zapalnych, przewlekłym zapaleniu powiek;
  - nieprawidłowości w łzawieniu po operacjach okulistycznych o różnym podłożu lub chirurgii estetycznej powiek;
  - noszenia miękkich lub półtwardych soczewek kontaktowych.

## Skład

Usieciowany wodny roztwór hialuronianu sodu (w tym 0,4% usieciowanego hialuronianu sodu), trometamol, kwas chlorowodorowy 2N, chlorek sodu, woda do iniekcji. Bez konserwantów.

## Instrukcja używania

- Dokładnie umyj ręce;
- Przed pierwszym użyciem usuń uszczelkę zabezpieczającą;
- Zdejmij nasadkę zabezpieczającą i otwórz butelkę;
- Odwróć butelkę do góry dnem i delikatnie wyciśnij po 2 krople do każdego oka, chyba że zalecono inaczej;
- Ze względu na specyficzne właściwości butelki z dozownikiem, do roztworów bez konserwantów, w miarę opróżniania butelki, konieczne może być mocniejsze jej ściśnięcie w celu dozowania produktu. Wynika to z właściwości systemu zamykania, który zapewnia sterylność oraz właściwości chemiczne i fizyczne roztworu bez użycia substancji konserwujących;
- Po użyciu zamknij butelkę: zawartość opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu.

## Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów okulistycznych.
- Produkt jest przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta.
- Nie należy używać produktu, jeśli butelka jest uszkodzona lub nie jest dokładnie zamknięta przy pierwszym otwarciu opakowania.
- Podczas aplikacji nie dotykać oka ani żadnej innej powierzchni końcówką dozownika.
- Produkt ze względu na swoją charakterystyczną lepkość bezpośrednio po aplikacji może powodować lekkie zamglenie widzenia, które szybko znika.
- Nie stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas używania należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

- Po zużyciu preparatu należy właściwie zutylizować pojemnik.

- Nie używać produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i etykiecie.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Przechowywanie

Produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 2°C do 30°C, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

Zawartość opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu.

## Dystrybutor

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**