

Dermatix żel 15 g



Nasza cena: 139,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15g
Postać	ZEL
Producent	MYLAN EPD POLSKA [PL]
Rejestracja	Inne

Opis produktu

Opis

DERMATIX spłaszczca, zmiękcza i wygładza blizny, łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu oraz zmniejsza stopień odbarwienia skóry.

Dawkowanie - Dermatrix, żel silikonowy do leczenia blizn, 15 g

Bardzo cienką warstwę żelu należy nakładać na leczonej powierzchni dwa razy dziennie z zachowaniem następujących zaleceń: powierzchnię, na którą ma być nakładany żel należy umyć, następnie wysuszyć, delikatnie rozprowadzić bardzo cienką warstwę na leczonej powierzchni, pozostawić do wyschnięcia na 4-5 minut przed przykryciem ubranie lub makijażem.

Składniki - Dermatrix, żel silikonowy do leczenia blizn, 15 g

Polisiloksan

Działania

Deramatix jest stosowany w leczeniu blizn po zakończeniu gojenia rany, gdy skóra jest nieuszkodzona oraz w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu w postaci bliznowca (keloid) lub blizny przerostowej. Dermatrix stosowany jest w leczeniu blizn pooperacyjnych, poparzeniowych i pourazowych. Dermatrix spłaszczca, zmiękcza i wygładza blizny, łagodzi świąd i uczucie dyskomfortu oraz zmniejsza stopień odbarwienia skóry.

Wskazania - Dermatrix, żel silikonowy do leczenia blizn, 15 g

Deramatix stosowany jest w leczeniu blizn po zakończeniu gojenia rany, gdy skóra jest nieuszkodzona oraz w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu w postaci bliznowca (keloid) lub blizny przerostowej. Dermatrix stosowany jest w wyniku gojenia ran pooperacyjnych, pourazowych i poparzeniowych.

