

## Dexoftyal MD krople do oczu 15 ml



Nasza cena: 29,64 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

#### Dexoftyal MD nawilżająco – regenerujące krople do oczu

wyrób medyczny  
duża i miękka butelka – 15 ml

Dexoftyal MD - szybka i długotrwała ulga dla suchych i zmęczonych oczu

Dexoftyal MD - możliwość aplikacji bezpośrednio na soczewki

Dexoftyal MD - wygodna i precyzyjna aplikacja kropli – duża i miękka butelka (15 ml)

**Dexoftyal MD - wyjątkowe połączenie dekspantenolu i Hydraflex:**

- wspiera regenerację,
- długotrwale nawilża,
- chroni powierzchnię oka.

Dexoftyal MD pozwala na ograniczenie dolegliwości oczu, takich jak:

- suchość,
- zmęczenie,

- pieczenie,
- podrażnienie,
- zaczerwienienie.

**Dexoftyal MD łagodzi objawy suchości oczu, które mogą być wywołane przez czynniki, takie jak:**

- długotrwała praca przed ekranem komputera, tabletu,
- długotrwałe patrzenia w ekran telewizora,
- noszenie soczewek kontaktowych,
- prowadzenie samochodu,
- przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach,
- klimatyzacja, wiatr, zanieczyszczenie powietrza, woda w basenie itp.

**Dexoftyal MD** to jałowe, lepkie, przejrzyste, nawilżające i odżywcze krople do oczu oparte na prowitaminie B5. Prowitamina B5 wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki. Dzięki właściwościom mukoadhezyjnym HydraFlexu film łzowy jest zachowany tak, że powierzchnia oka jest lepiej ochrona. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

**Dexoftyal MD** chroni oko przed dolegliwościami takimi jak uczucie suchości i w przypadku zmęczonych i podrażnionych oczu. Po zastosowaniu kilku kropli uczucie dyskomfortu jest złagodzone lub całkowicie zredukowane.

**Dexoftyal MD** może być stosowany bez specjalnych ograniczeń i jest dobrze tolerowany.

**Zastosowanie:** Podrażnienie lub pieczenie oczu, a także ich zaczerwienienie i uczucie zmęczenia, które mogą być wywołane przez czynniki typu: podrażnienie spowodowane noszeniem soczewek kontaktowych; długotrwała praca przed monitorem komputerowym lub długotrwałe prowadzenie pojazdów; przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz czynniki zewnętrzne jak wiatr, zanieczyszczenie powietrza lub wody.

Krople mogą być stosowane w trakcie noszenia soczewek kontaktowych.

**Skład:** Dekspantenol 2%, Hydroksypropyloceluloza (HydraFlex) 0,5%; Poliheksanid 0,0001%

**Sposób stosowania:** DEXOFTYAL MD można stosować na dwa sposoby: bezpośrednio do oczu lub za pośrednictwem soczewek kontaktowych.

*A: Bezpośrednio do oczu:* (osoby noszące szkła kontaktowe nie muszą ich wyjmować) – przyłożyć palec wskazujący do dolnej powieki oka i lekko ją pociągnąć w dół – posługując się drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; uważać, aby końcówka nie dotykała powierzchni oka! – zakropić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrużyć 2 lub 3 razy, aby preparat został równomiernie rozprowadzony na powierzchni całego oka

*B: Za pośrednictwem soczewek kontaktowych:* – ułożyć soczewkę na środkowym palcu; – nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę, a następnie włożyć soczewkę do oka; – zamrużyć okiem 2 lub 3 razy.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:** Nie stosować razem z lekami do oczu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nie używać w przypadku zakażenia oczu. Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników preparatu.

**Ostrzeżenia:** Nie stosować po 2 miesiącach od pierwszego otwarcia. Nie stosować po terminie ważności. Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C. Zamknąć butelkę bezpośrednio po użyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku wystąpienia niekorzystnych objawów lub podrażnienia, należy skontaktować się ze specjalistą.

**Działania uboczne:** Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu DEXOFTYAL MD.

**Opakowanie:** 15 ml DEXOFTYAL MD

Producent: TEGE Pharma B.V.

Dystrybutor: Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6 U, 01-015 Warszawa

ą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.