

## Ektin, krople do oczu na alergię, 10 ml



Nasza cena: 42,77 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROP.DO OCZU
Producent	Valeant Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

### Ektin, krople do oczu na alergię, 10 ml

Wyrób medyczny Ektin to krople do oczu na alergię bez konserwantów. Przynoszą ulgę zaczerwienionym i podrażnionym oczom.

#### Postać

Krople do oczu

#### Wielkość opakowania

10 ml

#### Właściwości i działanie

Ektin to krople do oczu, w których skład wchodzi Ectoin i kwas hialuronowy.

- Ectoin - naturalna cząsteczka, działająca ochronnie na komórki i zmniejszająca stan zapalny.
- Kwas hialuronowy – silnie wiąże wodę na powierzchni oka, przez co poprawia komfort widzenia.

Dzięki zaawansowanej formule, wyrób medyczny Ektin nie zawiera konserwantów ani buforów. Wpływa to na bardzo dobrą tolerancję produktu. Dodatkowo, może być on stosowany również przez osoby noszące soczewki kontaktowe i osoby z wrażliwymi oczami.

Krople do oczu Ektin przeznaczone są do leczenia i zapobiegania objawom sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia spojówek

(powodowanego np. przez pyłki, sierść zwierząt, roztocza kurzu lub pleśń). Krople łagodzą podrażnienia oczu i przywracają im nawilżenie.

- Krople bez konserwantów Ektin chronią oko przed szkodliwym wpływem alergenów.
- Wspierają proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki.
- Przynoszą ulgę zaczerwienionym, podrażnionym, swędzącym i łzawiącym oczom
- Mogą być stosowane przez dzieci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej butelce, krople do oczu Ektin mogą być stosowane przez okres 6 miesięcy po otwarciu.

## Stosowanie – jak często i jak długo należy stosować krople do oczu Ektin?

Ze względu na brak konserwantów w składzie, krople do oczu Ektin można stosować codziennie i dowolnie często. Nie ma ograniczeń co do długości okresu stosowania.

Podać 1-2 krople Ektin do oka, gdy pojawi się potrzeba.

## Sposób użycia

1. Usunąć nakładkę ochronną z końcówki butelki.
2. Umieścić kciuk na ergonomicznym wspieraniu dla kciuka, a dwa inne palce na dnie butelki.
3. Odwrócić butelkę do dołu. Przed pierwszym użyciem pompki należy ją napełnić naciskając wspieranie dla kciuka 7 razy, do momentu pojawienia się pierwszej kropli.
4. Odchylić nieznacznie głowę do tyłu. Przytrzymać butelkę w dogodnej pozycji nad okiem. Palcem wolnej ręki lekko odciągnij dolną powiekę. Delikatnie naciśnij wspieranie kciuka.  
Po zakropleniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną. W razie potrzeby, można użyć drugiej ręki, aby mieć dodatkowe wsparcie i uzyskać większą dokładność.
5. Aby zapobiec możliwemu zanieczyszczeniu roztworu, należy unikać kontaktu końcówki butelki z oczami lub palcami.
6. Natychmiast po użyciu nałożyć nakładkę ochronną na końcówkę butelki.

**Ważne!** Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym nieużywaniu produktu: skieruj butelkę w dół i naciśnij pompkę do momentu pojawienia się pierwszej kropli.

## Skład

kwasy hialuronowy 0,24% (w postaci hialuronianu sodu), Ectoin 2%, chlorek sodu, wodorotlenek sodu (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

## Kiedy nie stosować nawilżających kropli do oczu Ektin?

Kropli do oczu Ektin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

## Wybrane ważne informacje dotyczące stosowania produktu Ektin

- Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego.
- Produkt może powodować przemijające, niewyraźne widzenie, co może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
- Nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki, aby uniknąć ewentualnego urazu oka lub zanieczyszczenia roztworu.
- Po użyciu strząsnąć wszelkie pozostałe krople.
- Przed zastosowaniem innego produktu do oczu, należy odczekać około 15 minut.
- Krople do oczu bez konserwantów Ektin mogą być stosowane z miękkimi i twardymi soczewkami kontaktowymi.
- Po otwarciu produkt może być używany przez 6 miesięcy.
- Nie stosować po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.
- Krople Ektin należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Przechowywanie

Krople do oczu Ektin należy przechowywać w temperaturze +2 do +25oC.  
Chronić przed światłem!

## Dystrybutor

Bausch & Lomb GmbH  
Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin, Niemcy

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**