

# Elgydium Clinic Cicalium, żel na afty, 8 ml

Nasza cena: 21,59 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	8 ml
Postać	ZEL
Producent	PIERRE FABRE FRANCJA [FR]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### OPIS

Łagodzi ból i wspomaga gojenie się zmian chorobowych w jamie ustnej

Elgydium Clinic Cicalium to wyrób medyczny w postaci żelu, który wspomaga leczenie owrzodzeń i zmian chorobowych w jamie ustnej, łagodząc ból i ułatwiając gojenie.

Afty i zmiany chorobowe w jamie ustnej są stanami zapalnymi, które pojawiają się na błonie śluzowej. Towarzyszą im zmiany rumieniowate przypominające oparzenia i rany oraz powodujące ból podobny do tego, który występuje przy owrzodzeniach, co sprawia, że komfort życia pacjenta ulega pogorszeniu.

Żel Elgydium Clinic Cicalium nie jest szkodliwy w przypadku połknięcia. Może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

### Działanie

Wspomaga leczenie aft, owrzodzeń, podrażnień i ran w jamie ustnej spowodowanych zabiegami, aparatem ortodontycznym lub nieprawidłowo dopasowaną protezą.

Żel Elgydium Clinic Cicalium chroni śluzówkę jamy ustnej, pokrywając ją specjalną warstwą ochronną, łagodzi ból i wspomaga gojenie.

### Skład

Aqua, Pvp, Taurine, Xanthan Gum, Zinc Gluconate, Peg 40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin, Aroma.

### Sposób użycia

Nakładać 3 lub 4 razy dziennie bezpośrednio na zmianę chorobową za pomocą aplikatora.

Należy unikać jedzenia i picia przez co najmniej godzinę po zastosowaniu.

Żel Elgydium Clinic Cicalium nie jest szkodliwy w przypadku połknięcia. Może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

## Przeciwwskazania

Nie należy stosować żelu Elgydium Clinic Cicalium w przypadku znanej alergii na którykolwiek ze składników.

## Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Nie stosować, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.

Nie połykać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C w suchym miejscu z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Okres trwałości odnosi się do nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu.

## Zawartość:

8 ml

## Sposób przechowywania

15°C - 25°C

## Producent / Podmiot odpowiedzialny

PIERRE FABRE

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**