

Eva/qu czopki x 6

Nasza cena: 24,12 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*6
Producent	SO.SE. PHARM S.R.I. WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Czopki doodbytnicze Eva/qu skierowane są w szczególności do osób, które miewają zaparcia. Czopek po wprowadzeniu rozpuszcza się w ciągu 3-4 minut. Poprzez rozpuszczania się uwalniają mikropęcherzyki dwutlenku węgla które rozciągają ściany jelit, dzięki czemu zmiękczają masy kałowe, umożliwiając wypróżnienie.

Wskazania:

- zaparcia związane z wiekiem, ciążą lub laktacją, przewlekłym unieruchomieniem w łóżku, niepełnosprawnością
- przygotowanie do badania przez odbytnicę (chirurgiczne, gastroenterologiczne, urologiczne)
- retroskopia
- zaparcia związane z podróżowaniem

Działanie czopków jest przyjazne dla organizmu:

- Nie działają przeczyszczająco
- Nie uzależniają, mogą być stosowane często i długotrwale
- Działają miejscowo, łagodnie i fizjologicznie
- Zawierają wyłącznie substancje naturalne, całkowicie nietoksyczne, nie wchłaniające się, które po aplikacji uwalniają dwutlenek węgla i wodę
- Pozwalają zaplanować moment wypróżnienia
- Działają w oparciu o fizjologiczne mechanizmy
- Nie powodują działań ubocznych, odwodnienia, zaburzeń równowagi elektrolitowej
- Dają szybki efekt w ciągu kilku minut od zastosowania

Sposób użycia:

Wyjąć czopek ze szczelnie zamkniętego opakowania, następnie należy wprowadzić czopek do kanału odbytniczego aż do momentu kiedy cały czopek znajdzie się w odbycie. Jeżeli istnieje taka konieczność można uprzednio nawilżyć czopek.

Nie podawać produktu dzieciom do 12 roku życia i osobą u których stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.