

Fixsin zestaw do płukania nosa i zatok uzupełniający, 30 saszetek



Nasza cena: 20,20 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Saszetki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Fixsin zestaw do płukania nosa i zatok zawiera substancję rozpuszczoną - chlorek sodu – która przeznaczona jest do sporządzenia roztworu stosowanego do płukania nosa oraz zatok. **Zestaw Fixsin** do płukania nosa i zatok udrażnia i bardzo dobrze oczyszcza nos i zatoki ze zgromadzonej w nich wydzieliny oraz odkładającego, wydzielającego się śluzu. W ten sposób ogranicza gromadzenie się substancji, które odpowiadają za powstawanie infekcji.

Wskazania w stosowaniu **Fixsin**.

Zestaw do płukania nosa i zatok **Fixsin** zaleca się stosować w celach prewencyjnych, w czasie występowaniu objawów, oraz kooperacyjnej pielęgnacji nosa i zatok a w szczególności:

- podczas nieżyty nosa różnego pochodzenia
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- prewencyjnie dla utrzymania higieny nosa i zatok
- podczas zapalenia zatok przynosowych

Sposób użycia:

Płukanie należy przeprowadzić 1-2 dziennie lub z częstotliwością jaką polecił lekarz. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19 stopni Celsjusza). Płukanie nosa oraz zatok należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić temperaturę wody.

Zestaw jest bezpieczny i może być stosowany u dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci mogą stosować zestaw jedynie w obecności i pod ścisłą kontrolą osoby dorosłej. Zestaw jest bezpieczny dla kobiet w ciąży. Nie wpływa negatywnie na prowadzenie i obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych.

Jedna saszetka **Fixsin** w połączeniu z 240 ml wody tworzy roztwór do płukania nosa i zatok.

Instrukcja:

1. Do płukania należy używać tylko oryginalnych i czystych elementów zestawu FIXSIN oraz świeżego roztworu.
2. Wsypać zawartość saszetki FIXSIN do butelki
3. Butelkę należy napełnić przegotowaną wodą (o temperaturze ciała) do poziomu oznaczonego kreską co odpowiada pojemności 240 ml
4. Dokładnie zakręcić butelkę i potrząsać w celu rozpuszczenia substancji w wodzie
5. Należy przyłożyć butelkę z roztworem do otworu nosowego. Należy oddychać przez usta.
6. Płynnym ruchem ścisnąć butelkę w taki sposób aby połowa roztworu dostała się do nosa i wypłynęła drugim otworem nosowym.
7. Czynność należy powtórzyć w drugim otworze nosowym wykorzystując pozostałą część roztworu.
8. Nie wolno połykać roztworu
9. Po zakończeniu płukania należy wydmuchać nos.
10. Nie wykorzystaną ilość roztworu należy wylać ponieważ nie będzie nadawać się do ponownego użytku.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.