

Gargarin zatoki zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok saszetki x 32



Nasza cena: 13,07 zł

Opis słownikowy

Producent	FARMINA KRAKÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Zabieg płukania nosa i zatok powoduje, że zalegająca wydzielina ulega rozrzedzeniu, udrażniając nos i zatoki z zalegającego śluzu. Roztwór Gargarin ZATOKI oczyszcza nos i zatoki z bakterii, wirusów, alergenów oraz pyłu jednocześnie nawilżając śluzówkę. Zabieg ten chroni drogi oddechowe przed infekcjami.

Wskazania:

Zapalenie zatok przynosowych, nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, po ekspozycji na alergeny (pyłki roślin, kurz, pierze, sierść zwierząt domowych), przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa i zatok, profilaktycznie w celu utrzymania higieny nosa i zatok oraz do oczyszczania nosa i zatok po kontakcie z powietrzem zawierającym duże stężenie pyłu.

Sposób użycia:

W skład zestawu uzupełniającego wchodzi 32 saszetki z proszkiem do sporządzania roztworu. Dostępny jest także zestaw podstawowy zawierający butelkę 240 ml oraz 16 saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu.

Roztwór izotoniczny – wsypujemy zawartość jednej saszetki wyrobu medycznego Gargarin ZATOKI do butelki i uzupełniamy przegotowaną, wystudzoną wodą do linii 240 ml.

Roztwór hipertoniczny – wsypujemy zawartość dwóch saszetek wyrobu medycznego Gargarin ZATOKI do butelki i uzupełniamy przegotowaną, wystudzoną wodą do linii 240 ml.

Składniki:

100% chlorek sodu Ph.Eur.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

