

## GranuSEPT Hydrożel na rany, 150 ml



Nasza cena: 41,20 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	150 ml
Producent	Hexanova Sp.z O.o. Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

### GranuSEPT Hydrożel na rany, 150 ml

GranuSEPT® hydrożel służy do:

- oczyszczania ran oraz zapobiegania infekcjom
- do stosowania w przypadku drobnych otarć skóry, skaleczeń, rozcięć, poparzeń.
- do przemywania ran
- do nawilżania ran
- do stosowania na podrażnioną i zainfekowaną skórę

#### Skład

0,016% kwasu podchlorawego Substancje pomocnicze: woda jonizowana, chlorek sodu, fosforan monosodowy i fluorokrzemian sodowo-magnezowy.

#### Wskazania

GranuSEPT® hydrożel może być stosowany do nawilżenia opatrunku rany jak i samej rany, a także do rozmiękczenia zaschniętego opatrunku. Wypłukuje substancje drażniące odpowiadające za nieprzyjemny zapach z rany.

Hydrożel do oczyszczania ran GranuSept® to elektrochemicznie zmodyfikowany roztwór wody, stabilizowany kwasem podchlorawym. Służy przede wszystkim zmianie środowiska rany: mechanicznie usuwa ciała obce, które mogą powodować podrażnienia i infekcje skóry oraz zapewnia optymalne nawilżenie, wilgotność, dotlenienie oraz pH, wspierając w ten sposób proces gojenia.

Nie zawiera alkoholu

Nie wymaga spłukiwania

Może być stosowany u noworodków

## Sposób użycia

Nanieść GranuSept® hydrożel na dotknięty obszar, aby przemyć ranę i usunąć z niej zanieczyszczenia. Stosować według potrzeb, aby zapewnić optymalne warunki gojenia. Dla optymalnego efektu, po nałożeniu należy poczekać, aż naturalnie wyschnie.  
Produkt testowany dermatologicznie

## Przeciwwskazania

Preparatu GranuSept® nie należy stosować w przypadku rozpoznanej reakcji alergicznej lub nietolerancji na którykolwiek z jego składników. Produkt może być stosowany równocześnie z innymi lekami wyłącznie po konsultacji lekarskiej.

## Warunki przechowywania

Należy przechowywać w temperaturze pokojowej do maksymalnie 25°C, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego.

## Producent

Hexanova Sp. z o.o. Brukowa 36, 05-092 Łomianki

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**