

## Gruszka Nr 2 Z Miękkim Końcem



Nasza cena: 6,00 zł

### Opis słownikowy

Producent	ALBERT-POLSKA POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

Gruszka z miękkim końcem.

#### Dawkowanie - Gruszka Nr 2 Z Miękkim Końcem

Mięką końcówkę gruszki należy bardzo delikatnie wsunąć w otwory anatomiczne nosa lub uszu i wykonać czynności udrażniającą, czyszczącą poprzez zassanie. Przed i po użyciu gruszkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie wygotować w wodzie przez 10 minut.

#### Działania

Gruszki z miękkim końcem przeznaczone są do łagodzenia objawów przeziębienia, zapobiegania infekcjom górnych dróg oddechowych poprzez usuwanie wydzieliny kataralnej z nosa oraz zapobieganiu podrażnieniom i stanom zapalnym uszu, dzięki usuwaniu za ich pomocą wody i woskowiny.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**