


# Help4Skin gojenie oparzeń żel 75g

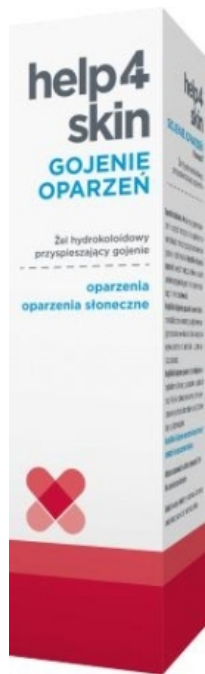

Nasza cena: 37,03 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	75 g
Postać	ZEL
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Help4Skin gojenie oparzeń jest inteligentnym hydrożelem, który reguluje poziom wilgotności rany. Nie tylko zabezpiecza ją przed wysychaniem lecz także absorbuje wilgoć, gdy staje się zbyt wilgotna. Help4Skin gojenie oparzeń natychmiast chłodzi i koi oparzone miejsce, dzięki wybranym substancjom pomocniczym podtrzymującym aktywność hydrożelu.

### Help4Skin gojenie oparzeń to hydrokoloidowy żel o uwolnionej skuteczności:

- Natychmiastowo zmniejsza ból
- Zapewnia efekt chłodzenia
- Przyspiesza gojenie
- Pomaga uniknąć infekcji
- Tworzy barierę ochronną
- Zmniejsza ryzyko powstawania blizn i strupów

### Wskazania:

- Oparzenia
- Oparzenia słoneczne

- Otarcia i pęknięcia skóry

### Sposób użycia:

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę.

### Powierzchowne oparzenia:

- Natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii nie zaleca się stosowania zimnej wody

- Raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać

- Jeśli to konieczne stosować opatrunek

### Oparzenia słoneczne:

- Oczyszczyć oparzone miejsce

- Raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać.

- Jeśli to konieczne stosować opatrunek

### Drobne rany:

- Oczyszczyć i zdezynfekować ranę,

- Jeśli to konieczne ostrożnie osuszyć sterylną gazą,

- Raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać.

- Jeśli to konieczne stosować opatrunek

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**