

Help4skin Kurzajki i brodawki 50 ml



Nasza cena: 49,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny Help4Skin kurzajki brodawki szybko i skutecznie usuwa brodawki i kurzajki przez wymrożenie (krioterapia). Aeroszol wystarcza na 12 aplikacji. Dodatkowo w opakowaniu znajduje się 12 jednorazowych aplikatorów, które zapewniają higieniczne użytkowanie oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa. Efekt widoczny już od 1. użycia.

Wskazania:

Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.

Dawkowanie:

Brodawki zwykłe i kurzajki:

Małe: poniżej 2,5 mm 10 sekund.
Średnie: od 2,5 mm do 5 mm 15 sekund.
Duże: powyżej 5 mm 20 sekund.

Brodawki podeszwowe:

Wszystkie wielkości od 20 do 40 sekund

Maksymalny czas zabiegu w przypadku brodawek podeszgowych w różnych częściach stopy. W przypadku brodawek podeszgowych należy moczyć stopę w gorącej wodzie przez co najmniej 6 minut, a następnie usunąć zrogowaciałą warstwę brodawki za pomocą pumeksu, aby zoptymalizować efekty zabiegu z wykorzystaniem wyrobu Help4Skin Brodawki i kurzajki.

Składniki:

Dimetyloeter i płynny propan.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.