

Home Check, Test Amfetamina, 1 sztuka



Nasza cena: 6,73 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Home Check, Test Amfetamina to **wyrób medyczny** w postaci testu paskowego jednorazowego użytku, przeznaczony do wykrywania obecności amfetaminy w ludzkim moczu. Test nadaje się do samodzielnego wykonania w warunkach domowych. Badanie wykonuje się szybko i sprawnie, a wynik testu jest możliwy do odczytu już po 5 minutach.

Domowy test pozwalający wykryć obecność amfetaminy w próbce moczu. Wyrób umożliwi wykrycie narkotyku już w 4-6 godzin od jego zażycia i do 2-3 dni po jego zażyciu. Opakowanie zawiera jednorazowy zestaw do diagnostyki in vitro w warunkach domowych.

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

Wyrób medyczny przeznaczony do wykrywania obecności D-amfetaminy w moczu człowieka.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- saszetka z testem paskowym
- instrukcja użycia

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć zatyczkę z karty testowej.

Włożyć paski testowe do próbki moczu na 10 do 15 sekund. Uważać by mocz nie miał styczności z plastikowym urządzeniem! Może to powodować nieprawidłowe wyniki.

Włożyć nasadkę na kartę testową i umieścić ją na płaskiej powierzchni.

Odczekać 5 minut (czas powinien być obliczany od momentu wyciągnięcia karty testowej z próbki).

Odczytać wynik.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Test jest jednorazowy. Nie stosować ponownie.

Jak w przypadku każdego domowego testu, wynik należy potwierdzić wykonując powtórne badanie w specjalizującej się do tego poradni, szpitalu lub innym miejscu do tego upoważnionym. Użytkownik domowego testu nie może podejmować decyzji medycznych bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem, bez względu na to czy wynik jest pozytywny czy negatywny.

Dodatni wynik testu nie oznacza, że dana osoba brała nielegalne substancje. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na dodatni wynik testu (np. niektóre środki medyczne przyjmowane przez osobę badaną, zabrudzenie próbki moczu takimi substancjami jak wybielacz czy ałun).

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Nie używać ponownie.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

PRODUCENT

AllTest

DYSTRYBUTOR

Milapharm Sp. z o.o.

W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z oznakowaniem opakowania i instrukcją używania

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.