

# Home Check, Test do wykrywania THC (marihuany) w moczu, 1 sztuka



Nasza cena: 6,73 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### OPIS

Home Check THC, Test do wykrywania THC (marihuany) w moczu to wyrób medyczny w postaci szybkiego testu paskowego jednorazowego użytku do wykrywania marihuany/THC w ludzkim moczu. Test nadaje się do samodzielnego wykonania w warunkach domowych.

Wynik testu jest możliwy do odczytu już w 5 minut po jego wykonaniu.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Instrukcja obsługi, karta testowa (wewnątrz foliowego woreczka), środki pochłaniające wilgoć.

### PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Wyrób medyczny przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności THC/marihuany w moczu człowieka.

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Home Check THC pozwala wykryć obecność jednego z najpopularniejszych narkotyków – marihuany/THC w próbce moczu. Opakowanie zawiera jednorazowy zestaw do diagnostyki in vitro w warunkach domowych.

### SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Zdjąć zatyczkę z karty testowej.

Włożyć paski testowe do próbki moczu na 10 do 15 sekund. Uważać by mocz nie miał styczności z plastikowym urządzeniem! Może to powodować nieprawidłowe wyniki.

Włożyć nasadkę na kartę testową i umieścić ją na płaskiej powierzchni.

Odczekać 5 minut (czas powinien być obliczany od momentu wyciągnięcia karty testowej z próbki).

Odczytać wynik. UWAGA! Nie należy odczytywać wyników po upływie 5 minut!

### PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Test jest jednorazowy. Nie stosować ponownie.

Jak w przypadku każdego domowego testu, wynik należy potwierdzić wykonując powtórne badanie w specjalizującej się do tego poradni, szpitalu lub innym miejscu do tego upoważnionym. Użytkownik domowego testu nie może podejmować decyzji medycznych bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem, bez względu na to czy wynik jest pozytywny czy negatywny.

Dodatni wynik testu nie oznacza, że dana osoba brała nielegalne substancje. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na dodatni wynik testu (np. niektóre środki medyczne przyjmowane przez osobę badaną, zabrudzenie próbki moczu takimi substancjami jak wybielacz czy ałun).

#### **UWAGI**

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Nie używać ponownie.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

W opakowaniu nie zawarte zostały: pojemnik na mocz i timer/stoper/zegarek, które są niezbędnymi elementami do wykonania testu.

#### **PRODUCENT**

AllTest

#### **DYSTRYBUTOR**

Milapharm Sp. z o.o.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**