


Home Check, Test hormonu TSH, 1 sztuka

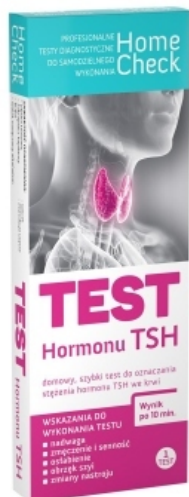

Nasza cena: 14,76 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Home Check Test Hormonu TSH to wyrób medyczny, który przeznaczony jest do domowego określenia poziomu hormonu TSH. Informacja o stężeniu tego hormonu jest przydatna w diagnostyce chorób tarczycy. Test jest prosty w obsłudze i szybki. Jego wynik jest możliwy do odczytania już w przeciągu 10 minut.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Saszetka z testem kasetowym oraz pipetą kapilarną, gazik do dezynfekcji, sterylny lancet (nakuwacz) do uzyskania próbki krwi, pojemnik z zakraplaczem zawierający 1 ml odczynnika, instrukcja użycia

WSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA TESTU

Zaleca się wykonanie testu w przypadku podejrzenia niedoczynności tarczycy, jeśli u pacjenta występują: podejrzenie zaburzeń funkcji tarczycy, nadwaga, zmęczenie i senność, osłabienie, obrzęk szyi, zmiany nastroju, częste odczuwanie zimna, nadmierne wypadanie włosów, nieregularne cykle miesiączkowe.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Poziom TSH we krwi jest podstawowym markerem, wykonywanym w celu sprawdzenia, czy tarczyca funkcjonuje prawidłowo. Stężenie TSH powinno oznaczać się przy nadczynności tarczycy, niedoczynności tarczycy, a także jako kontrolę leczenia zastępczego hormonami tarczycy, szczególnie w przypadku niedoczynności tarczycy.

PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki i sposobem użycia wyrobu.

W przypadku negatywnego wyniku badania, prze jednoczesnym występowaniu objawów tj.: kołatanie serca, uczucie gorąca, nadmierna nerwowość, chudnięcie i podwyższone ciśnienie zaleca się konsultację z lekarzem.

Zamoczenie płytki, pobranie zbyt małej ilości próbki lub dodanie niewłaściwej ilości odczynnika może być przyczyną uzyskania nieprawidłowego wyniku.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGI

W przypadku negatywnego wyniku badania, przy jednoczesnym występowaniu objawów tj.: kołatanie serca, uczucie gorąca, nadmierna nerwowość, chudnięcie i podwyższone ciśnienie zaleca się konsultację z lekarzem.

Zamoczenie płytki, pobranie zbyt małej ilości próbki lub dodanie niewłaściwej ilości odczynnika może być przyczyną uzyskania nieprawidłowego wyniku.

PRODUCENT

AllTest

DYSTRYBUTOR

Milapharm Sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.