

Home Check, Test na infekcje dróg moczowych, 1 sztuka

Nasza cena: 14,01 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Home Check Test Na infekcje dróg moczowych to wyrób medyczny w postaci domowego testu do wykrywania w moczu leukocytów, krwi, azotynów oraz białka. Jego użycie umożliwia diagnostykę infekcji dróg moczowych. Test jest prosty w obsłudze i szybki. Jego wynik jest możliwy do odczytania już w przeciągu 2 minut.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Plastikowy kubek, pasek testowy, wzorzec barw, instrukcja obsługi.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Wyrób medyczny, Home Check Test Na infekcje intymne pozwala wykryć 4 parametry w próbce moczu: leukocyty, krew, azotyny i białko.

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

Zaleca się wykonanie badania jeśli u pacjenta występują: ból podbrzusza, częstomocz, pieczenie, a także mętny wygląd moczu lub jego silny zapach.

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

Zebrać mocz do plastikowego pojemnika.

Otworzyć saszetkę i wyjąć z niej pasek testowy.

Zanurzyć pasek na 1-2 sekundy w moczu. Należy przy tym uważać, by wszystkie obszary testowe zostały zanurzone.

Wyjąć pasek i wytrzeć nadmiar moczu o krawędź pojemnika lub chłonny materiał.

Odczekać 2 minuty a następnie odczytać wynik, oddzielnie dla każdego parametru porównując go z dostarczonym wzorcem.

PRZECIWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z informacją zawartą w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Produkt jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.

UWAGI DO STOSOWANIA

Nie odczytywać wyniku po upływie 3 minut.

Podczas przyjmowania cefaleksyny i cefalotyny lub wysokie stężenie kwasu szczawiowego może również powodować sztuczne zaniżanie wyników badań.

Tetracyklina może powodować obniżenie reaktywności, a wysokie stężenie leku może wywołać reakcję fałszywie ujemną.

Wysoki poziom białka w moczu może zmniejszyć intensywność koloru reakcji.

Okres menstruacji, zaparcia mogą powodować wynik pozytywny na obszarze odpowiedzialnym za obecność krwi w moczu.

Wynik testu może być nieprawidłowy, jeśli mocz nie pozostaje długo w pęcherzu, z powodu głodu, diety bez warzyw lub kuracji antybiotykowej i leków zawierających fenazopirydynę.

Białko może być obecne w przypadku zapalenia pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego albo krwawienia w drogach moczowych.

Infuzje zawierające poliwinylpirolidon lub leki zawierające fenazopirydynę mogą dać wynik fałszywie dodatni.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Na wynik Testu na infekcje dróg moczowych (moczu) mogą mieć wpływ substancje powodujące nieprawidłowy kolor moczu, takie jak leki zawierające barwniki azowe (np. Pyridium®, AzoGantrisin®, AzoGantanol®), nitrofurantoina (Microdantin®, Furadantin®) i ryboflawina. 1 Rozwój koloru na płytce testowej może być zamaskowany lub może powstać reakcja barwna, która może być interpretowana jako fałszywy wynik.

PRODUCENT

AllTest

DYSTRYBUTOR

Milapharm Sp. z o.o.

W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z oznakowaniem opakowania i instrukcją używania

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.