

Hyabak nawilżające ochronne krople do oczu, 10 ml



Nasza cena: 42,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROPLE D/OCZU
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Hyabak nawilżające ochronne krople do oczu, 10 ml

Krople zaleca się osobom odczuwającym zmęczenie, pieczenie czy podrażnienie oczu, spowodowane:

- wielogodzinną pracą przy komputerze,
- przebywaniem w klimatyzowanych lub ogrzewanych centralnie pomieszczeniach,
- noszeniem soczewek kontaktowych,
- pracą w godzinach nocnych,
- podrażnieniem lub suchością oczu,
- chorobami ogólnymi, jak choroby tarczycy czy reumatyzm, lub zmianami hormonalnymi,
- przyjmowanymi lekami, np. na nadciśnienie tętnicze,
- zwyrodnieniem plamki – AMD,
- operacją okulistyczną.

Skład

Hialuronian sodu - 0,15 g.

Chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań.

Właściwości

Hipotoniczny roztwór przeznaczony jest do zakraplania oczu lub do stosowania na soczewki kontaktowe. Hyabak, nawilżające krople do oczu i soczewek zapewniają długotrwałe nawilżenie oraz ochronę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, dając uczucie ulgi i komfortu.

Znajdujący się w składzie kwas hialuronowy doskonale nawilża oko, wspomaga regenerację tkanek, a aktinokinol chroni tkanki oka przed

szkodliwym promieniowaniem UVB.

Sposób użycia

Preparat przeznaczony jest do użytku zewnętrznego — do oczu Preparat Hyabak jest jałowy. Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność działania preparatu przed każdym wkropleniem należy starannie umyć ręce i podczas wkraplania nie dotykać końcówką zakraplacza do powierzchni oka, powiek, rak i innych przedmiotów. Preparat należy wkraplać do worka spojówkowego pod lekko odchyłona palcem dolną powiekę. W przypadku stosowania preparatu na zakładaną soczewkę kontaktową: jedna krople preparatu nanieść na wklęsłą część soczewki.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia

Nie stosować produktu, jeśli pierścień zabezpieczający nakrętkę jest uszkodzony lub rozerwany. Nie dotykać końcówką zakraplacza do powierzchni oka. Nie wstrzykiwać, nie połykać. Stosowanie kropli Hyabak z filtrem UV nie zastępuje noszenia okularów słonecznych. Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dystrybutor

Thea Polska Sp. z o.o.

Producent

Laboratories Thea

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.