

Hyal-Drop Pro, nawilżające krople do oczu, 10 ml



Nasza cena: 39,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROPLE D/OCZU
Producent	BAUSCH HEALTH POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Hyal-Drop Pro, nawilżające krople do oczu, 10 ml

Wyrób medyczny Hyal-Drop Pro to nawilżające krople do oczu bez konserwantów. Niwelują objawy suchego oka.

Postać

Krople do oczu

Wielkość opakowania

10 ml

Właściwości i działanie

Nawilżające krople do oczu Hyal-Drop Pro niwelują objawy suchego oka, takie jak: zmęczenie, podrażnienie i uczucie obecności „piasku” pod powiekami. Odpowiednio dobrane składniki wspierają wszystkie trzy warstwy filmu łzowego: warstwę lipidową, wodną i mucynową. Krople do oczu Hyal-Drop Pro zapewniają nawilżenie oczu. Ze względu na brak substancji konserwujących w składzie, można stosować je codziennie i tak często, jak jest to potrzebne. Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania. Budowa dozownika umożliwia korzystanie z kropli przez 6 miesięcy po otwarciu.

Stosowanie – jak często i jak długo należy stosować krople do oczu Hyal-Drop Pro?

W razie potrzeby wpuścić 1 kroplę do oka.

Ze względu na brak konserwantów w składzie, nawilżające krople do oczu Hyal-Drop Pro można stosować codziennie i tak często jak zajdzie potrzeba. Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania.

Sposób użycia

1. Przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce.
2. Zdejmij nakładkę ochronną z końcówki butelki.
3. Umieść kciuk na ergonomicznym wspierciu dla kciuka i obejmij dolną część butelki palcami. Dwa palce umieść pod spodem butelki.
4. Odchyl nieznacznie głowę do tyłu. Skieruj butelkę końcówką do dołu i przytrzymaj pionowo nad okiem. Palcem wolnej ręki delikatnie odciągnij dolną powiekę. Naciśnij pompkę, aby uwolnić jedną kroplę do oka. Po zakropieniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną.
5. Natychmiast po użyciu strząśnij pozostałości kropli i nałóż nakładkę ochronną na końcówkę butelki.

Ważne! Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym nieużywaniu produktu: skieruj butelkę w dół i naciśnij pompkę do momentu pojawienia się pierwszej kropli.

Skład

0,24% hialuronian sodu, glicerol, karbomer, trójglicerydy, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

Kiedy nie stosować nawilżających kropli do oczu Hyal-Drop Pro?

Kropli do oczu Hyal-Drop Pro nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Informacje dotyczące stosowania produktu Hyal-Drop Pro

- Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego. Jeśli pacjent odczuwa trwały dyskomfort lub podrażnienie, powinien przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Produkt może powodować przemijające, niewyraźne widzenie po zakropieniu, co może mieć niekorzystny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Po otwarciu produkt może być używany przez 6 miesięcy.
- Przed użyciem należy zdjąć soczewki kontaktowe.
- Przed użyciem innego produktu do oczu lub założeniem soczewek kontaktowych należy poczekać co najmniej 15 minut. Aby zapobiec możliwemu urazowi powierzchni oka lub zanieczyszczeniu roztworu, nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki.
- Nie stosować po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.
- Krople Hyal-Drop Pro należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w opakowaniu – zawiera ona ważne informacje na temat stosowania tego produktu.

Przechowywanie

Krople Hyal-Drop Pro należy przechowywać w temperaturze +1 do +25oC.

Producent

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173
DE-13581 Berlin, Niemcy

Dystrybutor

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
Aleja Szucha 13/15, 00-580 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.