

Igła Novofine 31g 6 mm, 7 Szt.



Nasza cena: 3,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*7
Producent	NOVO NORDISK A/S DANIA [DK]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Igły NovoFine stanowią nierozdzielalną część systemu do podawania insuliny firmy Novo Nordisk i mogą być używane do wszystkich wstrzykiwaczy firmy Novo Nordisk (NovoPen 4 oraz NovoPen Junior).

Do produkcji igieł NovoFine wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia, zapewniająca doskonałość ostatecznego produktu.

Technologia "cienkiej ścianki" pozwala na redukcję oporów przy przepływie insuliny. Łatwość wkłucia igieł NovoFine zwiększa zastosowanie powłoki silikonowej, redukującej opory powstające przy przebijaniu skóry.

Wszystkie igły NovoFine są jednorazowego użytku! Po wykonaniu wstrzyknięcia powinny być usunięte, a do kolejnego zastrzyku należy założyć nową igłę.

Kilkakrotne użycie tej samej igły może powodować:

- odczuwanie bólu przy wkłuciu,
- infekcje,
- zniszczenia naskórka,
- blokowanie przepływu insuliny (na skutek krystalizacji insuliny wstrzykiwanej poprzednio tą samą igłą).

Należy pamiętać, aby po wstrzyknięciu insuliny odkręcić zużytą igłę! Pozostawienie nieodkręconej igły na urządzeniu do podawania insuliny po wykonanym wstrzyknięciu, może powodować wyciek insuliny lub dostanie się powietrza do zbiornika z insuliną.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.