

Iridium Free, krople do oczu 10 ml

Nasza cena: 32,38 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	KROP.DO OCZU
Producent	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Iridium A Free, krople do oczu, 10 ml

Sterylny izotoniczny roztwór do stosowania do oczu z solą sodową kwasu hialuronowego (FHA 1.0®), aminokwasami i wyciągiem z jeżówki. Bez konserwantów.

IRIDIUM A Free chroni i nawilża powierzchnię oka, łagodząc ewentualne schorzenia spowodowane podawanymi miejscowo lekami okulistycznymi. Kwas hialuronowy to mukopolisacharyd występujący fizjologicznie w oku człowieka, który przylega do powierzchni oka, chroniąc ją i nawilżając. Ze względu na swoje właściwości powlekające długo utrzymuje się na powierzchni oka i stabilizuje film łzowy. Wyciąg z jeżówki ma właściwości przeciwutleniające, a w połączeniu z nawilżającymi właściwościami kwasu hialuronowego wspomaga odbudowę prawidłowego filmu łzowego. Zawarte w produkcie aminokwasy pomagają nawilżyć powierzchnię oka i wspomagają ochronę nabłonka przed stresem. Butelka z produktem IRIDIUM A Free jest wyposażona w zakraplacz OSD (pozwalający na wyciskanie produktu), który dzięki wieloelementowemu filtrowi powietrza i systemowi barier zabezpieczających końcówkę zakraplacza zapewnia utrzymanie sterylności produktu bez konieczności używania konserwantów.

Wskazania

IRIDIUM A Free jest wskazany do nawilżania powierzchni oka w przypadku zmian jatrogennych takiej powierzchni.

Dawkowanie i sposób podania

Podawać 1–2 krople do worka spojówkowego 3 razy dziennie lub częściej.

Produkt może być podawany do oczu nawet w przypadku stosowania soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania

Potwierdzona nadwrażliwość na składniki produktu lub inne, podobne chemicznie substancje.

Instrukcja użycia

Przed pierwszym użyciem należy usunąć plastikowy pierścień zabezpieczający zakrętkę, pociągając za boczny, wystający element. Zdjąć zakrętkę. Obrócić butelkę dnem do góry nad okiem i ścisnąć jej boki palcem wskazującym i kciukiem, aż z butelki wypłynie kropla. W miarę wyczerpania się roztworu w butelce może być konieczne zastosowanie większej siły. Zamknąć ponownie butelkę zakrętką (5).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku okulistycznego i zewnętrznego.

Aby wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia roztworu należy upewnić się, że zakraplacz nie dotyka oka ani innych przedmiotów.

Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni oka podczas wkraplania nie należy dotykać oka zakraplaczem.

W miarę wyczerpania się roztworu w butelce może być konieczne zastosowanie większej siły do uzyskania kropli.

Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę.

W przypadku jednoczesnego stosowania miejscowych leków okulistycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Nie używać produktu, jeżeli butelka z zakraplaczem OSD jest uszkodzona.

Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Działania niepożądane

Nie zgłaszano żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu produktu. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. Po zastosowaniu produktu może wystąpić lekkie pieczenie oka i przejściowy dyskomfort widzenia.

Skład

Składnik główny: hialuronian sodu 0,15% (FHA 1.0®)

Pozostałe składniki: kwas borowy, czteroboran dwusodowy dziesięciowodny, wyciąg wodno-glikolowy z Echinacea angustifolia D.C., chlorek sodu, glicyna, L-leucyna, chlorowodorek L-lizyny, L-prolina, woda do wstrzykiwań.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności podanego na etykiecie butelki. Po pierwszym otwarciu produkt może być używany do upływu terminu ważności wskazanego na opakowaniu. Po zużyciu nie usuwać do środowiska.

Producent

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italy

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.