

# Irigasin Zestaw do płukania Nosa i Zatok Irygator + 12 saszetek



Nasza cena: 21,38 zł

## Opis słownikowy

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Producent   | AFLOPA - PABIANICE POLSKA |
| Rejestracja | Wyrób medyczny            |

## Opis produktu

### Opis

## Irigasin Zestaw do płukania Nosa i Zatok Irygator + 12 saszetek

Irigasin to wyrób medyczny przeznaczony do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok. Zestaw składa się z irygatora w postaci miękkiej butelki zakończonej ergonomicznym aplikatorem oraz 12 saszetek.

### Wskazania:

- ostre lub przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
- nieżyt nosa w przebiegu infekcji lub alergii
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- po ekspozycji na wysokie stężenie pyłu w powietrzu
- profilaktycznie dla utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

Irigasin umożliwia przygotowanie zarówno roztworu izotonicznego, jak i hipertonicznego, w zależności od potrzeb pacjenta.

**Hipertoniczny roztwór chlorku sodu**, poza działaniem oczyszczającym, ze względu na większe stężenie substancji czynnej, wykazuje właściwości osmotyczne, dzięki którym zmniejsza obrzęk śluzówki. Jest więc zalecany w przypadku obrzęku nosa towarzyszącego nieżytowi nosa w trakcie infekcji lub alergii (katar sienny), a także zapalenia zatok.

### Sposób postępowania z wyrobem:

**Dorośli i dzieci powyżej 4 roku życia:**

Płukanie nosa i zatok należy wykonywać 1-2 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.  
Dzieci mogą stosować wyrób jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

Przed zastosowaniem wyrobu u dzieci poniżej 4 roku życia, należy skonsultować się z lekarzem.

W celu przygotowania roztworu izotonicznego do butelki należy wsypać 1 saszetkę proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.

W celu przygotowania roztworu hipertonicznego do butelki należy wsypać 2 saszetki proszku, a następnie uzupełnić ją do zaznaczonej linii (240 ml) przegotowaną, ostudzoną wodą.

Do płukania należy używać wyłącznie butelki dołączonej do opakowania. Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki. Do każdego płukania należy przygotować świeży roztwór.

Wyrób może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz w trakcie karmienia piersią. Wyrób nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**