

Kompresy Jałowe Grassolind 5 x 5Cm x 10



Nasza cena: 25,05 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Producent	HARTMANN PAUL A.G. NIEMCY [DE]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Grassolind to opatrunek z maścią przeznaczony do opatrywania ran.

Grassolind przeznaczony jest do opatrywania ran, zwłaszcza powierzchniowych ran sączących (jak np. otarciach, ranach szarpanych, ranach tłuczonych, oparzeniach spowodowanych działaniem płomieni, gorących płynów i substancji żrących oraz okrywania miejsc pobrania i nakładania tkanek w praktyce przeszczepów skóry, w chirurgii plastycznej i kosmetycznej, po zabiegach usunięcia paznokci, operacjach usuwania stulejki itp). Dzięki zastosowaniu maści nie zawierającej substancji czynnych opatrunki te są szczególnie zalecane w dermatologii, a także u pacjentów o skórze wrażliwej i z uczuleniami lekowymi.

Siatka tiulowa o dużych oczkach umożliwia łatwy odpływ wydzieliny do wchłaniającej części opatrunku, w ten sposób unika się nagromadzenia wydzieliny. Maść zapewnia elastyczność brzegów rany, sprzyjając tworzeniu się tkanki ziarninowej, wspomagając proces epitelizacji i zapobiegając przyklejaniu się opatrunku do rany. Zmiana opatrunku jest bezbolesna i nie powoduje podrażnienia tkanki ziarninowej i warstwy młodego nabłonka.

Sposób użycia:

Wyjąć opatrunek z obiema nakładkami osłaniającymi z opakowania jednostkowego i w razie potrzeby przyciąć odpowiednio do wielkości rany. usunąć nakładkę osłaniającą z jednej strony opatrunku i położyć go na ranie, po czym usunąć drugą nakładkę osłaniającą. W celu odprowadzenia wydzieliny z rany umocować ponad opatrunkiem z maścią jałowy opatrunek chłonny. O ile lekarz nie zaleci inaczej, **Grassolind** należy zmieniać przy każdej zmianie opatrunku.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.