

# Krio, plaster chłodzący z mentolem, 12cm x 18 cm, 1 sztuka



Nasza cena: 1,66 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	MILAPHARM SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### OPIS

Krio Plaster to wyrób medyczny w postaci plastra chłodzącego. Produkt przeznaczony jest do miejscowego stosowania na skórę w celu uśmierzania bólów mięśni i łagodzenia ich napięcia. Wykazuje do 12 godzin działania.

### Skład

Rubber adhesive (Rubber, Super Ester, Silicone Dioxide Lanolin), Menthol, Camphor, Wintergreen Oil.

### Zawartość opakowania

1 plaster o wymiarach 12 cm x 18 cm.

### Działanie

Wyrób opiera swoje działanie na zawartym w nim mentolu. Substancja ta, poprzez swoje chłodzące działanie, pomaga zmniejszyć obrzęki związane z urazami. Działa również kojąco w przypadku bólów mięśniowo-stawowych.

### Przeznaczenie produktu

Dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.  
Stosowanie wyrobu u młodszych dzieci należy skonsultować z lekarzem.

### Wskazania

Do stosowania miejscowego na skórę, w celu łagodzenia napięcia i bólów mięśni, a także w przypadku bólów głowy i migreny.

## Sposób użycia wyrobu medycznego

Odciąć ostrożnie fragment wyrobu, tak aby dopasować jego wielkość do powierzchni i umiejscowienia bólu.

Zerwać folię ochronną z plastra.

Stronę pokrytą klejem przyłożyć na umytą i osuszoną skórę.

Zostawić plaster na skórze maksymalnie na 12 godzin.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przed użyciem należy przeczytać informacje znajdujące się w ulotce lub na opakowaniu wyrobu.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.

Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Produkt jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**