

Lancety Optilets jednorazowe x 200



Nasza cena: 31,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*200
Producent	DIAGNOSIS POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Jednorazowe sterylne lancety do punktowego nakłuwania skóry w celu pobrania próbki krwi kapilarnej

Do użytku z nakłuwaczem Optilets

Instrukcja użycia:

1. umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz
2. wybierz miejsce nakłucia
3. usuń nasadkę zabezpieczającą
4. wprowadź lancet do nakłuwacza, wykonaj nakłucie
5. wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia
6. załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.