

Leukoplast Softivel Opatrunek w sprayu, 30 ml



Nasza cena: 51,86 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------------|
| Opakowanie | 30ml |
| Postać | SPRAY |
| Producent | ESSITY POLAND POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Opis

Leukoplast Softivel Opatrunek w sprayu, 30 ml

Wskazania

Leukoplast Softivel Opatrunek w sprayu wskazany jest do zabezpieczania ran, drobnych skaleczeń i otarć przykładowo na kolanach, łokciach, piętach, palcach.

Właściwości

Leukoplast Softivel Opatrunek w sprayu to preparat, który dobrze sprawdzi się w zabezpieczeniu drobnych ran w miejscach, w których trudno zastosować konwencjonalny plaster.

- spray natychmiastowo hamuje niewielkie krwawienia,
- zapewnia 100% ochrony przed bakteriami,
- opatrunek ma charakter wodoszczelny,
- przezroczysty
- komfortowy w użyciu.

Sposób aplikacji

1. Wstrząśnij opakowaniem przed użyciem.
2. Spryskaj wybrane miejsce z odległości około 10 cm.

Nie stosuj preparatu na otwarte rany. Omijaj okolice oczu, nosa i genitaliów.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

