

Marimer Baby izotoniczny, spray do nosa, 100 ml



Nasza cena: 31,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	SPRAY DO NOSA
Producent	LABORATOIRES GILBERT FRANCJA [FR]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

Marimer Baby Izotoniczny to wyrób medyczny w postaci sprayu do nosa zawierający 100% naturalną wodę morską, pozyskiwaną z terenu Morskiego Parku Przyrody Iroise, bogatą w sole mineralne i pochodzące z morza oligoelementy. Marimer Baby izotoniczny można stosować codziennie dzięki fizjologicznemu stężeniu (stężenie izotoniczne - 0,9%). System mikrodyfuzji umożliwi delikatne i równomierne rozpylenie wody morskiej na błonę śluzową nosa. Końcówka aplikatora zapewnia łatwe i bezpieczne stosowanie.

SKŁAD

Roztwór izotoniczny wody morskiej (co odpowiada 9g/l NaCl), woda oczyszczona.

POSTAĆ PRODUKTU

Spray no nosa

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Marimer Baby Izotoniczny spray jest zalecany do stosowania u dzieci i niemowląt, w tym noworodków (z wyjątkiem wcześniaków):

- Do codziennej higieny nosa
- Nawilża błonę śluzową nosa
- Ułatwia usuwanie wydzieliny śluzowej z nosa
- Zalecany w przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

- Zaleca się podawanie niemowlętom w pozycji leżącej, a dzieciom w pozycji siedzącej lub stojącej.
- Przechylić głowę niemowlęcia lub dziecka na bok.
- Delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do nosa i rozpylić Marimer Izotoniczny do górnej części jamy nosowej.
- Powtórzyć czynność do drugiego otworu nosowego.

- Wyprostować głowę niemowlęcia lub dziecka, aby wydzielina spłynęła.
- U noworodków: należy wytrzeć nadmiar wydzieliny z nosa. W przy

DAWKOWANIE

Rozpylić 1-2 dawki do każdego roztworu nosowego, 1 do 3 razy dziennie, w zależności od potrzeb. Marimer Baby Izotoniczny można stosować codziennie przez dłuższy okres czasu.

OSTRZEŻENIA

- Nie stosować u wcześniaków.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na wodę morską.
- Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.
- Wszystkie ciężkie incydenty, które wystąpiły po zastosowaniu wyrobu medycznego należy zgłosić do wytwórcy wyrobu medycznego.

UWAGA: Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie może grozić wybuchem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C/122°F.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Produkt wytworzony we Francji.

Laboratoires Gilbert
928 Avenue du General de Gaulle
14200 Herouville Saint-Clair
Francja

Dystrybutor:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.