

Marimer spray do nosa, 100MI



Nasza cena: 31,11 zł

Opis słownikowy

Producent	GLENMARK DISTRIBUTORS POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Marimer to naturalny produkt, będący sterylnym, fizjologicznym roztworem wody morskiej, poddanej mikrodyfuzji. Naturalnie bogaty w sole mineralne i pochodzące z morza mikroelementy, Marimer jest zalecany dla niemowląt, dzieci i dorosłych do codziennego oczyszczania jam nosowych, szczególnie w przypadku wysuszenia błon śluzowych lub zalegania wydzieliny.

Dawkowanie - Marimer spray do nosa, 100MI

1 dawka do każdego nozdrza 1 do 4 razy dziennie w zależności od potrzeby.

Marimer może być stosowany codziennie przez dłuższy czas.

Sposób użycia:

- włożyć aplikator do nosa
- przechylić głowę na bok i rozpylić Marimer do górnego nozdrza.
- powtórzyć to samo z drugim nozdrzem
- wyprostować głowę, pozwalając, aby wydzielina spłynęła, następnie wytrzeć nadmiar roztworu (noworodki) lub wydmuchać nos (dzieci i dorośli).

Składniki - Marimer spray do nosa, 100MI

100% sterylny, izotoniczny roztwór wody morskiej. Zawiera 500 dawek.

Działania

Dzięki systemowi mikrodyfuzji, preparat Marimer zapewnia delikatny drenaż wydzieliny z jam nosowych. Specjalny aplikator umożliwia bezpieczne użycie u noworodków. Marimer może być stosowany niezależnie od pozycji pojemnika. Właściwa higiena nosa wspomaga ochronę błon śluzowych przed czynnikami zewnętrznymi (niską temperaturą, alergenami, suchym powietrzem, zanieczyszczeniami) i

ułatwia oddychanie.

Wskazania - Marimer spray do nosa, 100MI

Marimer jest zalecany dla całej rodziny:

- do codziennej higieny nosa
- do nawilżania wysuszonej śluzówki nosa
- jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.