


## Menopauza Test Płytkowy x 2

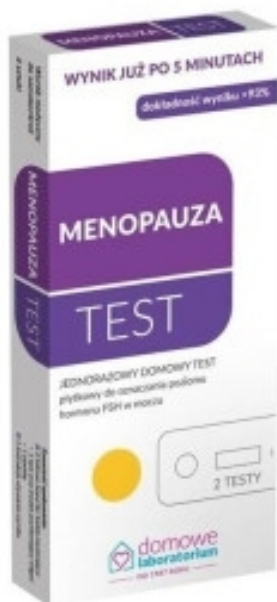

Nasza cena: 22,03 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*2
Producent	HYDREX PRZED.TECH.HANDL. POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Opis

**Menopauza** oznacza ostatnią miesiączkę w życiu kobiety, po której przez 12 cykli miesięcznych nie pojawiło się krwawienie. Jest to ważne wydarzenie w życiu kobiety, którego datę można określić dopiero po upływie pewnego czasu. Ogólnie wiadomo, że objawy poprzedzające ostatnią miesiączkę występują na 2 - 3 lata wcześniej i trwają kilka lat po menopauzie. Cały ten okres nazywany jest przekwitaniem lub klimakterium.

#### Kiedy wykonać test na menopauzę:

- Jeśli miesiączkujesz regularnie, ale obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy użyć w pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego, tzn. w czasie od 2 do 7 dnia twojego cyklu. Dla przypomnienia 1. dzień cyklu jest pierwszym dniem krwawienia miesięcznego. Badanie drugim testem z opakowania należy wykonać dokładnie tydzień później.

- Jeśli miesiączkujesz nieregularnie (między miesiączkami występują nawet dłuższe przerwy) i obserwujesz u siebie objawy przekwitania, to pierwszy test z opakowania należy wykonać w dowolnym dniu miesiąca i powtórzyć badanie przy użyciu drugiego testu z opakowania dokładnie tydzień później

#### Sposób użycia:

- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Wyjąć test strumieniowy i zapoznać się z jego budową. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.

- Zdjąć nasadkę i skierować końcówkę testu pod strumień moczu na około 10 sekund

Ważne: Należy zwrócić uwagę, aby mocz nie dostał się bezpośrednio do okienka wynikowego i kontrolnego testu strumieniowego.

- Można również zebrać mocz do suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na około 10 sekund samą końcówkę testu

- Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu, nałożyć nasadkę i umieścić test na poziomej powierzchni tak, aby widoczne były obydwa okienka testu.

- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienkach pojawią się barwne prążki.
  - Wynik testu odczytać po 3 minutach. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.
- Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

### **Wynik testu:**

#### ***Wynik dodatni***

Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w okienku testowym T i okienku kontrolnym C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub silniejsza niż natężenie barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że poziom hormonu FSH jest wyższy niż normalnie i możesz być w stadium perimenopauzy.

#### ***Wynik ujemny***

Pojawia się prążek w okienku kontrolnym C, prążek w okienku testowym T jest znacznie słabszy lub w ogóle nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie stadium perimenopauzy w tym cyklu nie wystąpi.

#### ***Wynik niejednoznaczny***

Nie pojawia się prążek kontrolny C. W przypadku, gdy prążek kontrolny C nie pojawi się, chociaż pojawi się prążek testowy T, wynik testu jest niejednoznaczny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu strumieniowego.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**