

Microdacyn Hydrogel, żel 60g



Nasza cena: 37,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 g
Producent	Kikgel Ujazd Polska [PI]
Typ Produktu	Kosmetyk

Opis produktu

Opis

Microdacyn Hydrogel, żel 60g

Microdacyn w formie amorficznego żelu zamkniętego w butelkach o pojemnościach 60 g. Każda butelka posiada wygodny aplikator. Żel, dzięki bardziej zwartej konsystencji dłużej utrzymuje się na ranie i poprawia procesy autolitycznego oczyszczania ran.

Hydrożel obok ran przewlekłych takich jak owrzodzenia, odleżyny czy stopa cukrzycowa może być również stosowany na odkrytych kościach, ścięgna i więzadłach.

By utrzymać dłużej wilgotne środowisko i lepsze uwodnienie tkanek, Microdacyn Hydrogel może być pokryty dodatkowo opatrunkiem hydrożelowym Aqua-Gel.

Zamknięte opakowanie posiada 1,5 roczny okres przydatności do użycia.

Po otwarciu opakowania hydrożel utrzymuje swoje aktywne działanie przez okres 60 dni, dlatego też może być stosowany wielokrotnie.

Microdacyn posiada następujące właściwości:

- Szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)
- Wykazuje właściwości przeciwzapalne i jest hipoalergiczny
- Jest bezpieczny dla zdrowych komórek. Nie są znane jego skutki uboczne
- Nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich
- Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, tkanek takich więzadła i ścięgna
- Nie powoduje uodpornienia bakterii

- Niweluje nieprzyjemny zapach ran
- Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT
- Obojętny odczyn pH

Aplikacja żelu:

- Przed aplikacją żelu należy wypłukać ranę płynem Microdacyn celem wypłukania zanieczyszczeń
- UWAGA!! Przed aplikacją żelu należy przekrócić aplikator w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara
- Hydrożel stosujemy w ranach wymagających autolitycznego oczyszczenia
- Stosując Microdacyn® Hydrogel warstwę żelu można przykryć innym opatrunkiem specjalistycznym, np. Aqua-Gel® lub gazą obficie nasączoną Microdacyn® by zapobiec wsiąknięciu żelu w gazę.