

Mucovagin żel 25 g



Nasza cena: 34,21 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	25g
Postać	ZEL
Producent	VERCO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Mucovagin żel 25 g

MUCOVAGIN ŻEL jest odpowiedzią na rozszerzenie wskazań do stosowania kwasu hialuronowego BASHYAL™ w regeneracji i nawilżeniu śluzówki pochwy. Nowa forma pozwala na podwójne zastosowanie: dopochwowo oraz na zewnętrzne okolice intymne.

MUCOVAGIN ŻEL to:

- Intensywne i długotrwałe działanie regenerujące i lubrykujące (nawilżające)
- Podwójne zastosowanie: dopochwowo i zewnętrznie
- Czysty skład - hipoalergiczny: bez substancji dodatkowych, tj. olejki, wyciągi roślinne, bez konserwantów, parabenów, bezzapachowy
- Higieniczne opakowanie i nowoczesny sposób podania: tuba 25 ml + 7 jednorazowych aplikatorów

Działanie:

Aktywnym składnikiem jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem organizmu ludzkiego. Kwas hialuronowy wiążąc się z wilgotną wydzieliną błony śluzowej pochwy, tworzy na jej powierzchni żelową powłokę. Stanowi ona barierę ochronną zabezpieczającą błonę śluzową i stwarzającą odpowiednie warunki do aktywacji naturalnych mechanizmów regeneracyjnych i obronnych. W ten sposób utworzony film ochronny zapobiega rozwojowi flory patogenicznej, przywraca naturalną wilgotność, ułatwia i przyspiesza procesy gojenia.

Wskazanie:

- Jako intensywnie nawilżający lubrykant, poprawiający kontakty intymne
- Jako łatwiejsza forma do aplikacji, np. po leczeniu onkologicznym
- W regeneracji i nawilżaniu błony śluzowej pochwy oraz zewnętrznych okolic intymnych
- Jako żel poporodowy, przyspieszający prawidłowe gojenie w okresie połogu

Sposób użycia:

Mucovagin żel należy używać wewnętrznie, miejscowo do pochwy lub zewnętrznie na okolice narządów płciowych. Przed użyciem i po użyciu żelu należy dokładnie umyć ręce.

Wewnętrznie:

Mucovagin żel należy aplikować wewnętrznie, w pozycji leżącej, za pomocą aplikatora dołączonego do opakowania, pozwalającego na zastosowanie odpowiedniej ilości żelu.

Zewnętrznie:

Nanieść niewielką ilość produktu (zawartość aplikatora) na okolice zewnętrznych narządów płciowych.

Składniki - Mucovagin żel 25 g

Aktywnym składnikiem jest drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy 100-300 kDA (BASHYAL TM) . Substancje pomocnicze: karbomer, woda, glikol propylenowy, trójetanoloamina

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.